

機械器具 11 放射線障害防護用器具  
一般医療機器 放射線防護用前掛 38355000

## パノラレントゲン防護衣コンフォート

### 【形状・構造及び原理等】

（中華人民共和国）

形状：襟なし、パノラマ（前後）タイプ  
寸法：（前幅：約600mm）×（前丈：約900mm）×（背中（左右幅）：約290mm）  
重量：約2.0kg  
材質：鉛ゴム、ポリエステル繊維、ナイロン  
鉛当量：0.175mmPb

### 【使用目的又は効果】

患者、術者、又は他の人員の体の一部を医療又は歯科における放射線被曝から保護するために用いる。

### 【使用方法等】

本品を患者等に着用させ、医療用又は歯科用レントゲン撮影を行う。

### 【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検、洗浄（【保守・点検に係る事項】参照）をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・取扱には十分に注意し、丁寧に扱うこと。
- ・内部の放射線防護材料の破損・キズ等の原因となるので、折り曲げたり、折り目をつけたり、鋭角な物の上に被せたりしないこと。
- ・長期使用により内部の放射線防護材料の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・医療有資格者以外には使用しないこと。
- ・廃棄の際は、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理（許可を得た産業廃棄物処理業者に依頼する等）すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・高温（80℃以下）、多湿、直射日光、水分（水濡れ）を避けて、外圧（物理的負荷）を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・折り畳んでの保管は、放射線防護材料の破損につながるおそれがあるため、ハンガーやハンガースタンドに掛けて保管すること。
- ・医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前及び使用後に必ず点検し、本品に破損、変形、その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・半年に1回以上の頻度で定期的に放射線透視又は透過写真撮影による検査を行い、損傷が確認された場合には使用しないこと。
- ・汚れた場合には、湿らせた布で拭き取り、その後消毒剤で清拭すること。酸性・アルカリ性の薬剤は使用しないこと。
- ・滅菌・煮沸等は変質や劣化のおそれがあるので、実施しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504

製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インストルメント  
カンパニー リミテッド  
(Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd)