

デンチャーポリッシャー

【形状・構造及び原理等】



〔原材料〕不織布表面処理材

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

- 補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ① 歯科技工用ハンドピースに装着して使用する。なお、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用すること。

【使用上の注意】

1. 〔使用方法に関連する使用注意〕

- ① 本品は、歯科技工用ハンドピースに用いる研磨ホイールです。口腔内には使用しないこと。
- ② マンドレールが付いていない場合は手持ちのマンドレールをご使用ください。また、本品が研磨中に楕円回転を起さない様に、ワッシャー中心部でマンドレールを確実に合わせ装着してください。
*** 必ず引っ張って見て確かめてください。**
- ③ 本品を使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
- ④ 研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡を使用すること。
- ⑤ 本品が研磨作業中に歯科技工用ハンドピースから外れない様に装着すること。
- ⑥ 本品の使用回転数は、15,000min⁻¹(rpm)以下で使用する。
- ⑦ 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。
- ⑧ バフホイール用洗浄清掃液中に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあります。また、マンドレール・ワッシャー等が腐食することが予想されますので十分注意すること。
- ⑨ 本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。
- ⑩ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 〔基本的使用注意〕

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 使用前に必ず(保守・点検に係る事項参照)をすること。
- ③ 使用目的(手術・処置・技工を含む医療行為)以外は使用しないこと。また、破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

〔有効期間等〕

- ① 本品は、使用有効期間等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため安全管理上新しい物と適時交換する事。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 クロダプロダクツ

住 所：〒136-0073

東京都江東区北砂3-4-4

電 話 番 号：03-3646-1734

F A X 番 号：03-3646-9207

販 売 業 者：株式会社 クロダブラシ

住 所：〒136-0071

東京都江東区亀戸1-18-11

電 話 番 号：03-3684-4921

F A X 番 号：03-3682-1924

取扱説明書等を必ずご参照ください。