

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

エンゼルキズ取りポリッシャー

【形状・構造及び原理等】



〔原材料〕不織布表面処理材

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

- 補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ① 歯科技工用ハンドピースに装着して使用する。なお、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用すること。

【使用上の注意】

1. 〔使用方法に関連する使用注意〕

- ① 本品は、歯科技工用ハンドピースに用いる研磨ホイールです。口腔内には使用しないこと。
- ② 本品を使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
- ③ 研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡を使用すること。
- ④ 本品が研磨作業中に歯科技工用ハンドピースから外れない様に装着すること。
- ⑤ 本品の使用回転数は、6,000min-1(rpm)以下で使用する。
- ⑥ 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。
- ⑦ バフホイール用洗浄清掃液中に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあります。また、マンドレル・ワッシャー等が腐食することが予想されますので十分注意すること。
- ⑧ 本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。
- ⑨ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 〔基本的使用注意〕

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 使用前に必ず(保守・点検に係る事項参照)をすること。
- ③ 使用目的(手術・処置・技工を含む医療行為)以外は使用しないこと。また、破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

〔有効期間等〕

- ① 本品は、使用有効期間等を特別定めていないため、長時間使用により材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下することがあるため、安全管理上、新しい物と適時交換する事。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 クロダプロダクツ

住 所：〒136-0073

東京都江東区北砂3-4-4

電 話 番 号：03-3646-1734

F A X 番 号：03-3646-9207

販 売 業 者：株式会社 クロダブラシ

住 所：〒136-0071

東京都江東区亀戸1-18-11

電 話 番 号：03-3684-4921

F A X 番 号：03-3682-1924

取扱説明書等を必ずご参照ください。