

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

## ジーシー 研磨ブラシ（NO. 2）

### 【形状・構造及び原理等】

形状



原材料

マンドレール：真鍮（ニッケルメッキ）  
ブラシ：軟質茶馬毛

### 【使用目的又は効果】

補綴物などの研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着して使用します。また、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用します。

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①ブラシの植毛部から絶対に毛を抜き加工をしないこと。
- ②ブラシのマンドレールを絶対に外さないこと。
- ③ブラシは長時間薬液消毒剤中に浸漬した場合、金属部が変色する事があるので注意すること。
- ④使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
- ⑤研磨作業中は、必ず保護用防具眼鏡を使用すること。
- ⑥本品は、10,000回転数/分以下の回転数で使用すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
  - ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
  - ②本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ①研磨効果を充分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。
  - ②ブラシを強アルカリ・強酸性洗浄清掃液中に浸漬すると、本品の軟性を損なうことがあるので充分注意すること。マンドレール・ワッシャー等は腐食することが予想されるので、充分注意すること。ブラシは、加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器）を使用し滅菌を行なうと、ブラシの軟性を失い使用できなくなるので、充分注意すること。また、過酸化水素液剤の使用は、天然毛ブラシの脱色及び変質するので充分注意すること。
  - ③本品は軟組織（歯肉・粘膜）との接触により、損傷を与えることがあるため、注意を払って器具を充分にコントロールすること。
  - ④本品が、歯科治療用ハンドピースに正確に装着されているか、確認して使用すること。必ず引っ張って見て確かめること。
  - ⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外は使用しないこと。
  - ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ①水分・汚れが付着したまま保管しない。
- ②本品は、歯科従事者以外は触れないように適切に保管・管理する。
- ③本品は、使用有効期間等を特別定めていないため、長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事が有るため、安全管理上新しい物と適時交換する。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社クロダプロダクツ  
住所：〒136-0073  
東京都江東区北砂3-4-4

発売元：株式会社ジーシー  
住所：〒113-0033  
東京都文京区本郷3丁目2番14号  
電話番号：（お客様窓口）0120-416480