

歯科用ディスポ基本セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用、再滅菌して使用しないこと。
2. 使用期限の切れたものを使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

＜概要＞

本品は、歯科診療で触診・組織の搔爬に用いる「ディスポーザブルデンタルプローブ」、口腔内診査又は圧排のために用いる「ディスポーザブルデンタルミラー」、口腔内に適用する創傷被覆・保護材等を把持する「ディスポーザブルデンタルピンセット」からなる。トレイに上記構成品とエプロン（医療機器対象外）が配置されて包装される。

＜形状・構造＞


○ディスポーザブルデンタルプローブ

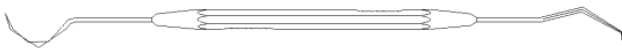

○ディスポーザブルデンタルミラー



○ディスポーザブルデンタルピンセット

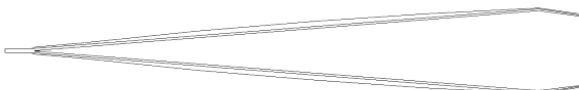

＜原材料＞

○ディスポーザブルデンタルプローブ

本体	ステンレス鋼
把持部	ポリプロピレン

○ディスポーザブルデンタルミラー

本体（ミラー）	ガラス
把持部	ポリプロピレン

○ディスポーザブルデンタルピンセット

本体	ステンレス鋼
----	--------

【使用目的又は効果】

本品は、歯科診療において一般的な処置を迅速に行うために、利便性を鑑みて必要なクラス I の医療機器及び被覆保護材を予め組み合わせた単回使用のキット製品である。

【使用方法等】

＜使用前＞

- ・本品は滅菌済みであるので、開封後直ちに使用できる。
- ・滅菌包装に破れなどの破損がないことを確認し、破損等が見つかった場合には使用しないこと。

＜使用時＞

○ディスポーザブルデンタルプローブ

口腔内検査や治療において、両先端の細い作業部分にて触診、組織の搔爬を行う。

○ディスポーザブルデンタルミラー

口腔内診査又は圧排を行う。

○ディスポーザブルデンタルピンセット

創傷被覆・保護材等を把持する。

＜使用后＞

本品は、単回使用であり再使用できない。使用後は適切に廃棄すること。

＜使用方法に関する使用上の注意＞

- ・使用前に本品の破損の有無を確認し、破損があった場合には使用しないこと。
- ・本品に無理な力を加えないこと。無理な力を加えて破損が生じた場合には廃棄すること。
- ・使用目的以外の目的で使用しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品に使用された原材料に対してアレルギーのある患者に使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温・多湿、直射日光や水濡れを避け、温度や湿度が極端に変化しない塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- ・油、酸、アルカリ性の物質に接触させないこと。
- ・変形の原因になるので、移動保管の際は本品に衝撃がかからないように取扱いに注意すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

＜有効期間＞

滅菌日より 2 年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社メディックスジャパン
電話 番 号： 092-944-0112
外国製造業者： Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd
シャンハイ シェンダ メディカル アプリケーションズ
(中華人民共和国)