



## ベケット持針器

### \*\*【禁忌・禁止】

#### <使用方法>

- 本製品を未滅菌のまま使用しないこと。  
【患者への感染のおそれがある】

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観図、構成

主に眼科領域における針と糸を用いての手術後の縫合において使用する。用途として縫合針を把持するために用いられる。本シリーズはより 33 種類より構成されている。

全長: 115 mm

KY-B-50  
ストッパー付マイクロ持針器  
全長: 115mm



KY-B-51  
ストッパー無マイクロ持針器  
止め具付き 全長: 115mm



KY-B-60  
ストッパー無スタンダード持針器  
止め具付き 全長: 115mm



KY-B-61  
ストッパー付スタンダード持針器  
全長: 115mm



KY2756-B-2133  
チタン曲丸ハンドル  
ストッパーなし



KY2756-B-2125  
チタン曲丸ハンドル  
ストッパー付き



KY2756-B-2053  
チタン曲丸ハンドル  
ストッパーなし



KY2756-B-2061  
チタン曲丸ハンドル  
ストッパー付き



KY-A4000  
直 ストッパーなし



KY-A4004  
直 ストッパー付き



KY-A4002  
曲 ストッパーなし



KY-A4006  
曲 ストッパー付き



KY-A4061  
トラウトマン氏持針器  
曲 ストッパー無



KY-A4084  
バラッケー氏持針器  
曲 ストッパー無



KY2720-B-2262  
曲丸ハンドル マイクロタイプ  
ストッパーなし



KY2720-B-2270  
曲丸ハンドル マイクロタイプ  
ストッパー付き



KY2720-B-2211  
曲丸ハンドル スタンダードタイプ  
ストッパー付き



KY-A4112  
直 タングステン・カーバイド  
ストッパーなし



KY-A4113  
直 タングステン・カーバイド  
ストッパー付き



KY-A4114  
曲 タングステン・カーバイド  
ストッパーなし



KY-A4115  
曲 タングステン・カーバイド  
ストッパー付き



KY-A4161  
直 ストッパーなし



KY-A4162  
直 ストッパー付き



KY-A4163  
曲 ストッパーなし



KY-A4164  
曲 ストッパー付き



KY-A4011  
直 ストッパーなし



KY-A4013  
直 ストッパー付き



KY-A4015  
曲 ストッパーなし



KY-A4017  
曲 ストッパー付き



KY-A4021  
直 ストッパーなし



KY-A4023  
直 ストッパー付き



KY-A4025  
曲 ストッパーなし



KY-A4027  
曲 ストッパー付き



#### 2. 被検者に接触する部分と組成

先端部分: ステンレス鋼

#### 【使用目的又は効果】

主に眼科領域における針と糸を用いての手術後の縫合において使用する。

【使用方法等】

1. 万年筆を持つ要領で長めに持つ。
2. 通針時には手掌の側面を術野の近くに置く。

\*\*【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本製品は非滅菌品である。使用前及び使用毎に必ず洗浄及び滅菌を行うこと。([保守・点検に係る事項]を参照)
- 落下や強い衝撃を与えないこと。[破損のおそれ]
- 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

\*\*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の際には、保管期間に関わらず必ず乾燥させること。
2. 滅菌済の本製品を保管する際には、再汚染を防ぐため、清潔な場所に保管すると共に有効保管期間の管理を実施すること。

\*\*【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は出来るだけ早く付着している血液・体液・組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌・乾燥を実施すること。
2. 汚物除去に用いる洗浄液は適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 洗浄液の残留が無いように充分濯ぐこと。
4. 滅菌方法及び滅菌条件は各医療機関の規定に従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL：03-3815-7787

製造業者：

Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd

(アシュトン社：英国)