



ボルク レンズフォセップ


【禁忌・禁止】

・落下させるなどして破損した場合には修理交換を依頼すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図、構成

全長 : 100mm 本体…チタン

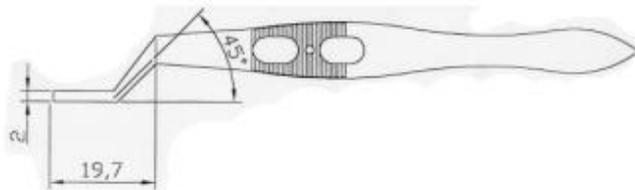

2. 品目仕様等

目視試験 把持部先端が噛み合い、大きいキズがないこと

【使用目的又は効果】

本機器は米ボルク社製レンズを先端部で把持して使用する。
眼科用手術顕微鏡下で用いられる。

【使用方法等】

1. ペンを握る要領で持ち、レンズ縁部分を矢印部分で把持する。
2. 手持部分を押し、処置部が把持される。離すと、把持部が緩む。



【使用上の注意】

使用後はオートクレーブ滅菌のこと。

【保管方法及び有効期間等】

特別な設定はなし

【取扱い上の注意】

落下に注意のこと。

【保守・点検に係る事項】

先端部が把持時に確実に合うか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 :
株式会社キーラー・アンド・ワイナー
TEL : 03-3815-7787
2. 製造業者 :
製造会社 : Volk Optical Inc.
(ボルク社、アメリカ合衆国)