



ヴィッカーズ シザーズ

**【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 本製品を未滅菌のまま使用しないこと。
[患者への感染のおそれがある]

**【形状・構造及び原理等】

1. 外観図、構成



2802-B-2004	Universal Scissors Straight
2802-B-2012	Fine Scissors Straight
2802-B-2020	Fine Scissors Curved
2802-B-2039	Long Scissors Straight
2802-B-2047	Long Scissors Curved

2. 被検者に接触する部分と組成

先端部分: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

手術における術野の切断に使用する。

【使用方法等】

上刃と下刃の間に患部・組織を挟み、手持ち部を上下から押し合わせ刃を交差させて切除する。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本製品は非滅菌品である。使用前及び使用毎に必ず洗浄及び滅菌を行うこと。([保守・点検に係る事項]を参照)
- 落下や強い衝撃を与えないこと。[破損のおそれ]
- 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の際には、保管期間に関わらず必ず乾燥させること。
2. 滅菌済の本製品を保管する際には、再汚染を防ぐため、清潔な場所に保管すると共に有効保管期間の管理を実施すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか確認すること。
2. 使用後は出来るだけ早く付着している血液・体液・組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌・乾燥を実施すること。
3. 汚物除去に用いる洗浄液は適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
4. 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときには、先端同士が接触しあって損傷することがないように注意すること。
5. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
6. 滅菌方法及び滅菌条件は各医療機関の規定に従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL: 03-3815-7787

製造業者 :

Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd

(アシュトン社: 英国)