



ヴィッカーズ鑷子

**【禁忌・禁止】

- ・本製品を未滅菌のまま使用しないこと。
[感染症のおそれがある]
- ・電気メスと併用しないこと。[感電または火傷のおそれがある]

**【形状・構造及び原理等】

1. 外観図、形状



商 品 名	全 長	先 端 形 状
ユニバーサルリング鑷子	145mm	
ファインリング鑷子	155mm	
ユニバーサルV字形鑷子	145mm	
ロングリング鑷子(曲)	205mm	
ロングリング鑷子(直)	205mm	
ファインV字形鑷子	155mm	
ファインプレーン鑷子	155mm	

2. 被検者に接触する部分と組成

先端部分: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

主な用途として組織もしくは治療材料を把持するために用いられる。

**【使用方法等】

1. ペンを握る要領で持つ。
2. 手持部分を押し、処置部が把持される。離すと、把持部が緩む。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 本製品は非滅菌品である。使用前及び使用毎に必ず洗浄及び滅菌を行うこと。【保守・点検に係る事項】参照。
- ・ 落下や強い衝撃を与えないこと。【破損のおそれ】
- ・ 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ・ 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の際には、保管期間に関わらず必ず乾燥させること。
2. 滅菌済の本製品を保管する際には、再汚染を防ぐため、清潔な場所に保管すると共に有効保管期間の管理を実施すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか確認すること。
2. 使用後はできるだけ早く付着している血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・乾燥すること。
3. 汚物除去に用いる洗浄液は適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
4. 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインプエクタ等)で洗浄するときには、先端同士が接触しあって損傷することがないように注意すること。
5. 洗浄液の残留がないよう十分にすすぐこと。すすぎには浄化水(滅菌蒸留水等)を用いることを推奨する。
6. 洗浄後は必ず乾燥すること。
7. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
8. 滅菌方法及び滅菌条件は各医療機関の規定に従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL: 03-3815-7787

製造業者: Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd
(英国)