

## ホギー マキシムアイズ



### 【警告】

- ・本製品を落下させたり、強い衝撃を与えると故障の原因となる恐れがある。
- ・本製品は精密医療機器であり、知識及び経験のない者が分解しないこと。
- ・本製品を改造しないこと。

### 【禁忌・禁止】

- ・術者の網膜に支障をきたす恐れがあるので、本製品で光源等を直接視しないこと。
- ・いかなる液体にも浸さないこと。故障の原因になる。
- ・故障・損傷の際には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観図、構成

本体正面外観図



本体側面外観図



付属品装着時外観図



本製品本体は光学的にはガリレオ式のガリレアンタイプの双眼ルーペである。

また、付属品のフレームは競技用サングラスを基に設計されており、通常の眼鏡フレームと比較して弾力性があり、本製品本体とは着脱可能なマグネット付きヒンジを介して接続する。

本製品本体である双眼ルーペ部には次の仕様がある。

	倍率	焦点距離	型式番号
1	2.5×	35cm	2.5 × 350
2		45cm	2.5 × 450

#### 2. 品目仕様等

1	外観上の欠陥（異常の有無）がないこと。
2	光学系の傷、汚れ、歪み等の異常がないこと。
3	光学系などの固定状態に異常がないこと。
4	有害な内面反射、迷光等の原因となる障害、欠陥が認められないこと。
5	両眼視機能：実際に装着して指標を支障なく、容易に両眼視出来ること。

#### \*\*【使用目的又は効果】

本製品は医療分野各科における微細な手術または処置において、処置又は観察の対象を拡大し、より確実に安全な処置や作業が行えるようにする為の拡大用の双眼ルーペである。

本製品は医療分野に限らず、細かい作業を行うあらゆる分野で使用することが可能である。

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用前

- (1) 本製品付属品のシールドをフレーム前面の装着部に装着する。  
◇装着する際はシールドの穴とフレーム前面のマグネットボタンとを合わせて嵌め込むこと。  
◇術者が眼鏡を使用する場合には同時に使用することは出来ない。



- (2) 本製品付属品のノーズパッドをフレーム背面のマグネット式装着部へ装着する。

◇術者が眼鏡を同時に使用する際は「ハーフムーンノーズパッド」を使用すること。

スタンダードノーズパッド      ハーフムーンノーズパッド



- (3) ノーズパッドの上下位置は術者に合わせて調整することが可能である。


ノーズパッドが下位置



ノーズパッドが上位置



- (4) 本製品本体の双眼ルーペ部をマグネット付きヒンジと共にフレーム前面のマグネットボタンに装着する。
- (5) マグネット付きヒンジの3箇所の支点及び左右のルーペの中心からの角度を調整し、術者に最も適した位置に双眼ルーペ部を合わせる。

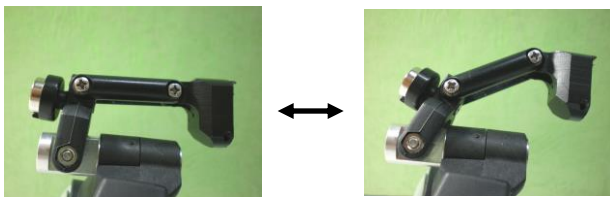

◇術者が両眼で双眼ルーペを覗いた時、影や二重像の無い鮮明な円形の視野が得られるように調整を行うこと。

## 2. 使用中

- (1) 本製品を術者の頭部に装着し、サポートコードを用いて保持する。
- (2) 手術または処置中は必要に応じて各部の位置を調整して使用すること。

## 3. 使用后

- (1) レンズ表面及びシールドが汚れた場合にはアクセサリーのレンズクリーニングクロスで清掃し、埃等はブロアーで空気を吹き付けて清掃すること。  
本体筐体及びフレームの汚れは中性洗剤を塗布した布等で拭くこと。
- (2) 本製品は精密医療機器であり、埃等の付着を防ぐ為に使用後は必ず専用ケースに入れて保管すること。

### \*\* 使用の際は次のことを注意すること。

1. 使用前に目視で各部を点検すること。
2. 使用前に術者に合わせて各部の調整を行うこと。
3. 術者の網膜に支障をきたす恐れがあるので、本製品で光源等を直接視しないこと。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

本製品は精密医療機器であり、埃等の付着を防ぐために必ず専用ケースに入れて保管すること。

### 【取扱い上の注意】

本製品は精密医療機器であり、取り扱いには充分注意を払うこと。

### 【保守・点検に係る事項】

定期的を目視で各部を点検し、レンズ部分はレンズクリーニングクロスで清掃すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 1. 製造販売業者：

株式会社キーラー・アンド・ワイナー  
TEL：03-3815-7787

#### 2. 製造業者：

株式会社キーラー・アンド・ワイナー  
TEL：03-3815-7787