

**2021 年 2 月（第 5 版）
*2017 年 9 月（第 4 版）

医療機器届出番号：30B3X00001001001

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

スティックポイント

**【形状・構造及び原理等】

高純度のセラミックファイバーをエポキシ樹脂で固めたもの

直径 2.35mm、長さ 5cm 円柱棒状

ミニは直径 2.35mm、長さ 1.6cm に直径 2.35mm、長さ 3.4cm ホルダーを付着し、先端を砲弾型に加工

**【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる。
先端部の形成で通常出来ない細部の研磨ができます。

- インレー・クラウンの咬合面
- 小窩裂溝の修正と研磨
- 金属床の凹凸面の修正と研磨
- ボーセレンの形態修正と研磨
- レジン床の歯間乳頭部の修正と研磨
- アタッチメントの細部修正と研磨

種類

レッド、レッドミニ	：	仕上げ研磨用
ブルー、ブルーミニ	：	荒研磨用
ワイン、ワインミニ	：	極荒研磨用

*【使用方法等】

スティックポイントをハンドピースに直接固定し、エンジンを回転させながら専用のダイヤモンドドレッサーを用いて、使用目的に応じてスティックポイントの形態を修正して使用する。
ミニはすぐにハンドピースに装着し使用できる。

【使用上の注意】

- ・連続で使用する場合は濡れタオルで冷やしながら使用しますと磨耗が防げます。
- ・損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネなどを装着して使用すること。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元	：	株式会社キクタニ
電話番号	：	073-432-7135
FAX 番号	：	073-424-3902
製造元	：	株式会社キクタニ