

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

マルチポリ

【形状・構造及び原理等】

直法体の固形状

成分：二酸化ケイ素、ステアリン酸、パラフィン、
その他の油脂

【使用目的又は効果】

樹脂系歯科補綴物のキズを取り艶を出す。

研磨時 樹脂を焼けにくくしています。

【使用方法等】

通法どおり形態修正の後 ロビンソンブラシ（ソフト）や
マルチバフに本品を付着させ研磨する。

ロビンソンブラシの場合は 5000 回転前後で焼き付かせ
ない様に研磨する

マルチバフの場合は 8000～10,000 回転数で研磨する。

研磨終了後は通法により洗浄して下さい。

【使用上の注意】

- ・本剤は目に入らないように注意して下さい。
万一目に入った場合はこすらず直ちに水で十分洗い流して
下さい。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネ等 を装着して使用して下さい。
- ・研磨作業を行う時は粉塵による人体への影響を避ける為
局所吸引装置、防塵マスクなどを使用し粉塵を吸収しない
ようにして下さい。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧（物理的負荷）
及び汚染を受けないように保管して下さい。

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 ： 株式会社キクタニ

電話番号 ： 073-432-7135

FAX 番号 ： 073-424-3902

製造元 ： 株式会社キクタニ