

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

マルチバフ

【形状・構造及び原理等】

円形のバフをマンドレールに装着したもの
バフ：化学繊維を成分とする布
直径 25mm、厚さ 5mm
マンドレール：鋼鉄製
円柱状長さ 48mm x 直径 2.3mm
頭部径 4.5mm

【使用目的又は効果】

樹脂系補綴物のキズを取り艶を出す。
金属の補綴物は艶出しに使う
研磨技術のレベルに関係なく簡単に速く綺麗に出来る

【使用方法等】

通法どおり本品をハンドピースにセットし、マルチポリを
付着させ研磨する。

【使用上の注意】

- ・最高許容回転数 18,000 回転／分を超えて使用しない。
- ・バフはレジン用、金属用に分けて使う。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネなどを装着して使用すること。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

室温保管

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 ： 株式会社キクタニ
電話番号 ： 073-432-7135
FAX 番号 ： 073-424-3902
製造元 ： 株式会社キクタニ