

2021 年 2 月（第 1 版）

医療機器届出番号：30B3X00001001006

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

カーボランダムポイント

【形状・構造及び原理等】

作業部：炭化ケイ素を結合剤で固めたもの
直径 5mm 長さ 17mm の砲弾型
軸部：直径 2.35mm ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯および陶歯、陶材、硬質レジン、金属等の補綴物研削に用いる。

【使用方法等】

通法どおり本品をハンドピースにセットし、研削する。

【使用上の注意】

- ・使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・最高許容回転数 30,000 回転／分を超えて使用しない。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネなどを装着して使用すること。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社キクタニ
電話番号：073-432-7135
FAX 番号：073-424-3902
製造元：株式会社キクタニ