

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

チタンルージュ

【形状・構造及び原理等】

砥粒を油脂等で固めたもの。

直径 3 c m ブルーの棒状長さ 2.5 c m（±10%）固形物 45 g
直径 3 c m ブルーの棒状長さ 10 c m（±10%）固形物 150 g

【使用目的又は効果】

本材は歯科用電気エンジンやマイクロモーターに装着した馬毛ブラシ・フェルトパフに本品をつけて歯科修復物を口腔外で研磨する際に使用する

【使用方法等】

通法どおり形態修正の後、回転させた馬毛ブラシやフェルトパフに本品を付着させ研磨する。

【使用上の注意】

- ・高速回転で使用すると本材が飛び散る恐れがあるので、10,000 回転/分以下で使用して下さい。
- ・ロビンソンプランに付着させるとき、強く押し付けしないで下さい。
- ・本剤は目に入らないように注意して下さい。
万一目に入った場合はこすらず直ちに水で十分洗い流して下さい。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネ等を装着して使用して下さい。
- ・研磨作業を行う時は粉塵による人体への影響を避ける為
局所吸引装置、防塵マスクなどを使用し粉塵を吸収しない。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿を避けて常温保管
- ・水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管して下さい。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 ： 株式会社キクタニ
電話番号 ： 073-432-7135
FAX 番号 ： 073-424-3902
製造元 ： 株式会社キクタニ