

2021 年 2 月（第 1 版）

医療機器届出番号：30B3X00001001012

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

フェルトバフ

【形状・構造及び原理等】

フェルトを直径 22mm 厚さ 10mm の円盤状
軸部：直径 2.35mm ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本材は歯科用電気エンジンやマイクロモーターに装着し、ルーージュ等をつけて歯科補綴物を口腔外で研磨する際に使用する

【使用方法等】

通法どおり形態修正の後、回転させた本品にルーージュを付着させ研磨する。

【使用上の注意】

- ・最高速度は 15,000 回転/分以下で使用して下さい。
- ・本品にルーージュを付着させるとき、強く押し付けしないで下さい。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネ等を装着して使用して下さい。
- ・研磨作業を行う時は粉塵による人体への影響を避ける為局所吸引装置、防塵マスクなどを使用し粉塵を吸収しない。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・常温保管
- ・水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管して下さい。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 ： 株式会社キクタニ
電話番号 ： 073-432-7135
FAX 番号 ： 073-424-3902
製造元 ： 株式会社キクタニ