

2024年4月（第1版）

医療機器届出番号：30B3X00001001014

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

ダイヤモンド

【形状・構造及び原理等】

作業部：高品質ダイヤモンドを高密度に含有させている砥石。

C1 直径 16mm長さ 3.5mmの円柱型

C2 直径 5mm長さ 12mmの円柱型

軸部：直径 2.35mm、長さ 39mmステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ジルコニア歯科補綴物の研削に用いる。

【使用方法等】

口腔外で通法どおり本品をハンドピースにセットし、研削する。

【使用上の注意】

- ・最高許容回転数 10,000 回を超えて使用しない。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネなどを装着して使用すること。
- ・変形、損傷（錆、表面傷、まがり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

室温保管

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社キクタニ

電話番号：073-432-7135

FAX 番号：073-424-3902

製造元：株式会社キクタニ