

*2024 年 9 月（第 2 版）
2024 年 4 月（第 1 版）

医療機器届出番号：30B3X00001001021

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

アフロブラシ

【形状・構造及び原理等】

円形のバフをマンドレールに装着したもの

バフ：化学繊維を成分とする布に砥粒を付着させたもの
直径 25mm、厚さ 10mm ±5mm
マンドレール：直径 2.3mm 長さ 39mm ステンレス鋼

#1 荒 #240 茶色

#2 中 #400 グリーン

*#3 細目 #3000 オレンジ

【使用目的又は効果】

義歯・レジン冠歯科補綴物の研削に用いる

【使用方法等】

口腔外で通法どおり本品をハンドピースにセットし、研削する。

【使用上の注意】

- ・最高許容回転数 6,000 回を超えて使用しない。
- ・長時間連続で使用すると過熱を帯びることがあるので、断続的に使用するように注意すること。
- ・変形、損傷（錆、まがり、汚損）等のるものは使用しないこと。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネなどを装着して使用すること。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

室温保管

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社キクタニ

電話番号：073-432-7135

FAX 番号：073-424-3902

製造元：株式会社キクタニ