

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

患者保護カバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【包装】

5・10・20 個／箱

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

本品は、不織布、ポリエチレン材等からなるカバー部とこれをアーチ形に支えるアーチ部とフレーム部を有し、検査室やその他の処置室で患者身体の一部を保護するために覆う。

使用患者に応じてサイズの異なる種類がある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社杏林システマック

<http://www.kyorin-systemac.co.jp>

0800-777-2490

＜主な材質＞

不織布、ポリエチレン等

社内管理番号

301

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、検査室やその他の処置室の汚染（器具やテーブルの上）から患者身体の一部を覆って隔離するための保護的なカバー又は障壁として用いる樹脂製及び不織布製の用具である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 患者に応じたサイズを選択し、清潔操作で包装から取り出す。
2. フレーム部を患者の体位の下に入れ、アーチ部をフレーム部に差し込む。
3. カバー部を広げ、患者を覆う。
4. 使用後は、カバー部の外側を丸めて廃棄する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品は、医師又は医療関係者の監視下でのみ使用すること。
2. 使用目的以外に使わないこと。
3. カバー部を密封しないこと [酸欠の恐れがある]。
4. 本品は 1 回限りの使用で必ず廃棄し、滅菌や再使用しないこと。
5. 廃棄する際は感染防御の観点から適切な廃棄方法を選択すること。

【保管方法及び期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避け保管すること。