

2011年11月17日（第2版）
2015年7月1日（第3版）

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 一般的名称：吸引チューブ（16779000）

再使用禁止

吸引チューブ

【警告】

本品は、医師又は、医師の指導を受けた医療従事者以外は使用しないこと。


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
（本品はデイスポーザブル製品であり再使用による機能低下、並びに交差感染のおそれがある。）
- ・本品や包装に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・材質：ポリ塩化ビニール
本品はポリ塩化ビニール（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。
- ・本品はエチレンオキシサイトガス（EOG）滅菌済商品です。

■型番 B-002 吸引チューブ（円錐形コネクタタイプ）

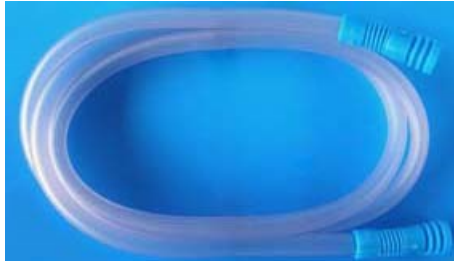

■サイズ

長さ（cm）：180cm 以上10cm単位に選択可
標準内径：7（mm）都度対応内径：5（mm）、6mm

本添付文書に該当する製品のサイズ等については、包装表示ラベルに記載されているので確認すること。

原理：吸引器より吸引された血液、体液、分泌液、滲出液、骨片などが本品を介して回収容器に送られる。

- ・吸引器及び回収容器にしっかりと接続できること。

【使用目的、又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。（当品目の定義から）

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用直前に包装から吸引チューブを取り出す。
2. コネクターで吸引器、回収容器にしっかりと接続する。
吸引器、回収容器に合ったコネクターを選択する。

＜使用方法に関する注意＞

1. 包装の破線したものを、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
2. 廃棄する際は医療廃棄物として適切に処分する事。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

＜有効期間＞ 製造年月より3年

【包装】1個／袋 滅菌包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

京中貿易株式会社

京都市中京区神泉苑通御池下る神泉苑町1番地2

Tel:075-811-0545

製造業者

Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.

中華人民共和国

杭州京冷医疗器械有限公司