

2011年11月17日（第1版）  
 2013年12月06日（第2版）  
 2015年7月1日（第3版）

機械器具 50 開創又は開孔用器具  
 一般医療機器 一般的名称：開孔器（35517000）  
**バイトブロック**

**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**

本品は、医師又は、医師の指導を受けた医療従事者以外は使用しないこと。

**【禁忌・禁止】**


- ・再使用禁止  
 （本品はデイスポーザブル製品であり再使用による機能低下、並びに交差感染のおそれがある。）
- ・本品や包装に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・再滅菌禁止

**【形状・構造及び原理等】**

- ・材質：ポリ塩化ビニール  
 本品はポリ塩化ビニール（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。
- ・本品はエチレンオキサイトガス（EOG）滅菌済商品で

■型番 Ki-003 バイトブロック

■外形

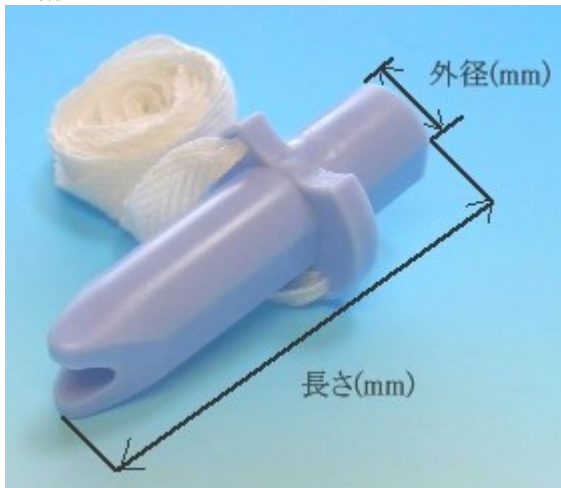

■ サイズ

	S (小型)	M (中型)	L (大型)
外径 (mm)	10.5	12.5	15
長さ (mm)	52	60	70

原理：  
 筒の形状をしたブロック体で硬度に富んでおり、上下顎切歯間に挿入することで開口を維持する、気管内チューブと固定し気管内チューブの噛み防止を行う

**【使用目的、又は効果】**

様々なサイズ、形状及び輪郭のものがある。遠位端は丸く、挿入して開孔するときに内腔、身体開口部又は管を拡張又は伸張することができる。検査又は他の器具の挿入時に用いる。（当品目の定義の一部から）

**【使用方法等】**

＜使用方法＞

1. 滅菌包装からバイトブロックを出す。
2. 気管内チューブの横にバイトブロックの中央部の出っ張りから下の尖った方を挿入する。
3. バイトブロックの中央部の出っ張りにある穴を通した紐で気管内チューブと固定する。この際バイトブロックの中央部の出っ張りの凹みに気管内チューブを付ける。
4. さらに紐の上からテープで気管内チューブと固定し、さらにテープで全体を顔面と固定する。このことで気管内チューブの噛み防止を実現する。適切なサイズのものを選択すること。

＜使用方法に関する注意＞

1. 包装の破線したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
2. 廃棄する際は医療廃棄物として適切に処分する事。

**【保管方法及び有効期間等】**

＜貯蔵・保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

＜有効期間＞ 製造年月より3年

**【包装】**

1個／1袋 滅菌包装

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

京中貿易株式会社

京都市中京区神泉苑通御池下る神泉苑町1番地2

Tel:075-811-0545

製造業者

Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.

中華人民共和国

**杭州京冷医疗器械有限公司**