

2013年3月7日(第3版)  
2014年1月16日(第4版)  
2015年7月1日(第5版)

機械器具 06 呼吸補助器  
一般医療機器 一般的名称：単回使用人工呼吸器用ウォータトラップ (36276000)

再使用禁止

ウォータトラップ

**【警告】**

本品は、医師又は、医師の指導を受けた医療従事者以外は使用しないこと。

**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止  
(本品はデイスポーザブル製品であり再使用による機能低下のおそれがある。)
- 使用前及び再接続時にはガス漏れがないかを確認すること(適切な換気が行えないおそれがある)
- 本品が呼吸回路の最も低い位置になるように設置すること(患者の気道に水が流れ込むと肺炎などの原因となるおそれがある。)

**【形状・構造及び原理等】**

- 材質：本品はポリ塩化ビニルを使用している。
- 本品は未滅菌商品です。

■型番 Ku-004 ウォータトラップ



■ サイズ

上部2箇所のコネクター部：22M/15F  
集水容量：30cc、

原理：ウォータトラップが呼吸回路の一番低い位置になるようにセットし復水を回収することで患者側への流出を防ぐと共に、水の排出作業を容易にする。

**【使用目的、又は効果】**

加温加湿時に蓄積する復水を回収するため、人工呼吸器の呼吸回路に用いる装置をいう。通常、22mmの先細コネクタを用いて呼吸回路の呼気リムに接続する。回路から除去する場合の液漏れを防ぐため、自動密閉機能を備えるものもある。

本品は単回使用である。

(本品の「一般的名称」の定義)

- 人工呼吸器回路に確実に接続可能なコネクタを持つ。
- コネクタサイズ：22M/15F

**【使用方法等】**

＜使用方法＞

- 包装からウォータトラップを出し、2箇所のコネクター部に呼吸回路の蛇管を接続する。
- ガス洩れの無いことを確認する。
- ウォータトラップに復水が溜まったらウォータトラップの下部を引き抜き水を廃棄して再度しっかり丁寧に接合する。引き抜く際に液漏れを防ぐため、自動密閉機能を備えるものが自動シール弁付タイプであり、弁無しはその機能が無い。使い分けが必要。
- 接合後はガス洩れの無いことを確認する。

＜使用方法に関する注意＞

- 再使用禁止(本品はデイスポーザブル製品であり再使用による機能低下のおそれがある。)
- 本品や包装に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 廃棄する際は医療廃棄物として適切に処分する事。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

＜貯蔵・保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

**【包装】** 1個/袋

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

京中貿易株式会社

京都府京都市中京区神泉苑通御池下る神泉苑町1番地2

Tel:075-811-0545

製造業者 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.

中華人民共和国

杭州京冷医疗器械有限公司