

2012年04月20日（第1版）
2015年7月1日（第2版）

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 一般名称：活栓（32172011）

再使用禁止

三方活栓

【警告】

本品は、医師又は、医師の指導を受けた医療従事者以外は使用しないこと。

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
(本品はディスプレイ製品であり再使用による機能低下、並びに交差感染のおそれがある。)
2. 本品や包装に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】


- ・本品はエチレンオキサイドガス（EOG）滅菌済商品です。
(パルクは未滅菌)

■型番 Ye-016 三方活栓

■ 各部の名称

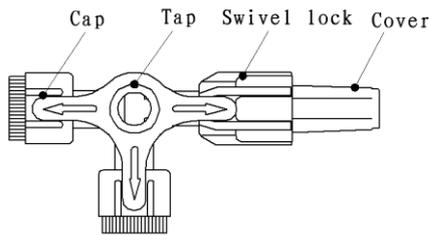

上面図

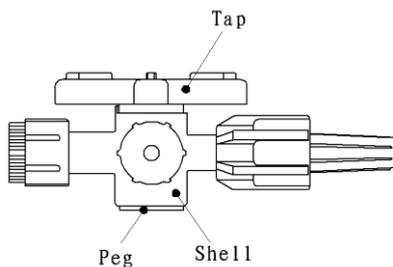

側面図

- 本品には Cap が 1 個のものもある。
- 本品には Cover が無いものもある
- 本品はポリカーボネート樹脂を使用している。
- 本品は滅菌済であり、発熱性物質は含まれていません。

【使用目的、又は効果】

脈管系への液注入を調節する血管内投与キットの部品をいう。
本品は単回使用である。

(本品の「一般名称」の定義から)

【使用方法等】

1. 包装表示部の「PEEL」表示の箇所から開封して下さい
2. 他の医療機器と確実に接続して下さい。
3. Tap を回転し、流路を変更して下さい。

＜使用方法に関する注意＞

1. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
2. 本品は輸液以外に使用しない事。
3. 使用 1 回限りとし、使用後は直ちに廃棄すること。
4. 万一、包装や製品に破損や以上がある場合は使用しない事。
5. あらかじめ接続部に緩み無い事を確認してから使用する事
6. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、薬液漏れ及び詰まり等が無いことを確認する事。
7. 他の医療機器と接続する場合は液漏れが生じないようにしっかりと接続する事。
8. 本品から薬液を混注する場合は空気混入に注意する事。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

＜有効期間＞ 製造年月より 3 年

【包装】 1 個/バック 50 個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

京中貿易株式会社

京都府京都市中京区神泉苑通御池下る神泉苑町 1 番地 2

Tel:075-811-0545

製造業者

Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.

中華人民共和国

杭州京冷医疗器械有限公司