

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏（JMDN コード：34864000）

処置パットA

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


本品は、傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる絆創膏である。幾つかの形状があり、付属品としてロールテープを付ける場合がある。

<代表例>

（1）Aタイプ



（2）Bタイプ

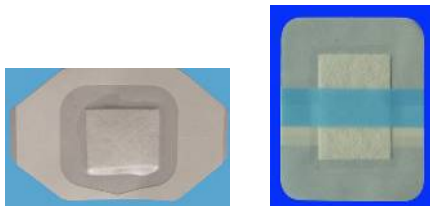

*（3）Cタイプ



（4）ロールテープ

3. 原理

不織布パット等により、傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いることができる。

【使用目的又は効果】

本品は、傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、創部にパッドをあてて周りのテープを伸ばさずに貼付する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
2. 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは

血液や浸出液などのにじみが見られた場合は、直ちに新しいものと貼りかえること。

<その他の注意>

1. 開封後、直ちに使用すること。
2. はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

2. 有効期間

個箱に表示（自己認証データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：協和株式会社

**電話番号：042-366-8633

製造業者：Zibo Qichuang Medical Products Co., Ltd.
中国