

医療用延長コード

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- ・可燃性物質がある場所での使用 [引火による火災の発生や、患者及び手術従事者に重大な損傷を与えるおそれがある。]

製造業者：Zhejiang Jinhua Huatong Medical Appliance Co., Ltd.
中国

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

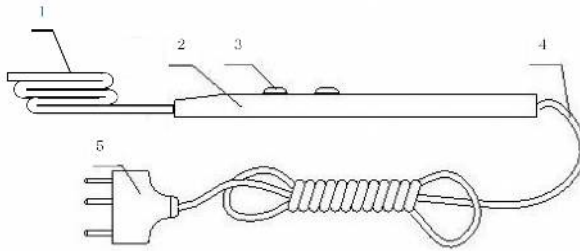

1：ケーブル 2：ハンドピース 3：スイッチボタン
4：ケーブル 5：プラグ

原材料：PVC、ABS樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、電気手術器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために使用する。

【使用方法等】

1. プラグ部を電気手術器に接続し、使用する。本品のご使用前には必ず点検を行い、洗浄、滅菌を行って下さい。（保守・点検に関わる事項を参照下さい）
2. 接続時に、電気手術器等にしっかり接続されていることを確認すること。
3. コードの破損は、発熱・火災・感電の原因となるため、電気手術器等から取り外すときは、コードを引っ張らないこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・電気手術器への接続は正しく行ない、接続端子の金属部分が露出しないよう注意すること。
- ・取り外しに際しては、本製品の接続部を持ってゆっくりと引き抜くこと。

【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

洗浄条件・滅菌条件は、各施設で定められた基準に従って行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：協和株式会社

*電話番号：042-366-8633