

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ（JMDNコード：13705000）

グリーンタオル

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品はセルロースのスポンジにX線造影材を組み合わせたものである。

原材料：綿100%、X線造影材

【使用目的又は効果】

本品は、出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥若しくは汚染からの器官の保護を目的として、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に用いる。X線で検知できる成分を含む。

【使用方法等】

1. 本品を清潔に取り出し、内視鏡外科手術で臓器圧排材として使用してください。
2. 体腔内へ挿入後、生理食塩液にて膨潤させてから使用してください。

【使用上の注意】

1. 開封後は直ちに使用してください。
2. 電気メス等を近づけると、引火したり、X線造影材が剥がれるおそれがあるので、注意して使用してください。
3. 本品を使用する場合は、内径12mm以上のトロカールを使用してください。
4. 使用前、使用中に関わらず本品を切る等の加工はしないでください。
5. 体腔内への無理な挿入や抜去、器具類を使用しての粗雑な扱い、鉗子で薄く小さくつかむなどは、本品の破断の原因となるので、注意して使用してください。
6. 本品を体外に抜去するときは、2～3cm以上の切開部から本品が破断しないように注意して抜去してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。
2. 有効期間
パッケージに表示（自己認証データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：協和株式会社

*電話番号：042-366-8633

製造業者：KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
中国