


機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ（JMDNコード:38749000）

サッカー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

＜代表例＞

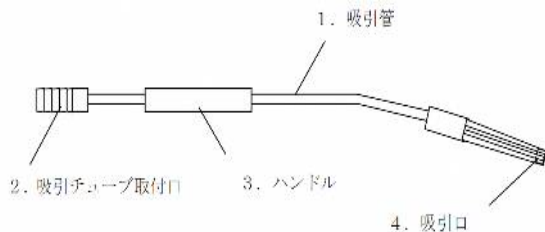

原材料：ステンレススチール、ABS樹脂

製品の表面を損傷するので使用は避けてください。洗剤は医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：協和株式会社

*電話番号：042-366-8633

製造業者：Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd.
中国

【使用目的又は効果】

本品は、手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する器具である。本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 本品は、使用前に必ずオートクレーブ又はガスによる滅菌処理をして使用する。
2. 手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する。
3. 使用後は適切にできるだけ早く洗浄する。

【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌ですので使用前に洗浄、消毒、滅菌を行ってください。
2. 折損、変形等の原因になるので、本品に必要以上の力を加えないで下さい。
3. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因となるので付着した場合は直ちに清水で洗浄してください。

【保管方法及び使用期間等】

1. 腐食を防ぐ為、本品の洗浄後は直ちに乾燥させてください。
2. 滅菌済の本品を貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐ為清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間を管理してください。

【保守・点検に係わる事項】

1. 使用後は直ちに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄、消毒、滅菌を行ってください。
2. 本品の滅菌は、オートクレーブ、ガス、薬液が使用可能です。
3. 洗剤の残留がないように十分にすすぎ洗いをして下さい。仕上げすすぎには、浄化水（蒸留、脱イオン等）を使用してください。
4. 洗浄後は腐食防止の為に直ちに乾燥してください。
5. 洗浄後滅菌前に、汚れ、損傷、変形等に異常がないことを点検してください。
6. 強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、製品を腐食させる恐れがあるので使用は避けてください。金属たわし、磨き粉等は