

廃液用キャニスター


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

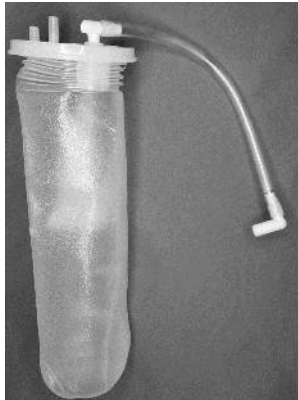

原材料：PVC

【使用目的又は効果】

本品は、体液の回収のため吸引器とともに使用する。

【使用方法等】

1. 吸引器に設置し、吸引器の吸引接続口と 本品の装置端チューブ L 字コネクタをチューブ等で接続する。
2. 本品の患者端に吸引チューブで接続する。
3. 吸引チューブにより体液等の吸引を行う。
4. 使用後、接続したチューブを取り外し、施設の手順に従い、本品を廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・本品を複数の患者に使用しないこと。
 - ・本使用前には全ての接続部分にゆるみがないことを確認すること。
 - ・廃液には直接触れないこと。[感染のおそれがある。]
 - ・オートクレーブにかけないこと。[変形する恐れがあるため]
2. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下のような不具合の可能性がある。

 - (1) 重大な不具合
 - ・吸引不良
 - ・漏れ
 - ・破損、亀裂
 - ・接続不良

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：協和株式会社

電話番号：042-366-8633

製造業者：Zhangjiagang Shengang Medical Products Co., Ltd.
中国