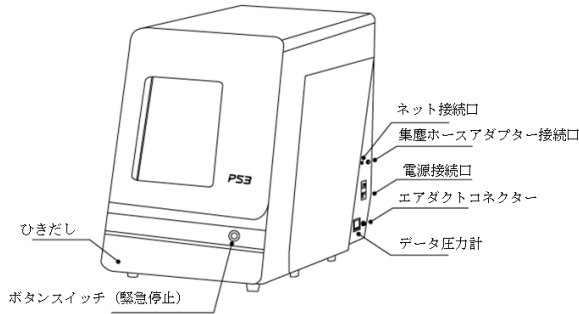


機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000
歯科用CAD/CAMマシン P 5 3

【形状、構造及び原理等】**1. 外観形状・構造****寸法・質量**

寸法（幅×奥行×高さ）：443.5×718×628.5（mm）

質量：約 87Kg

電気規格

AC 100～240V 50～60Hz

消費電力：約 200W

4. 原理

メインスピンドルに回転運動を与え、X、Y、Z 軸及び A、B 軸方向の CNC 制御により、材料とミリングバーを接触させて切削加工を行う。

【使用目的又は効果】

本製品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計（CAD）又はコンピュータ支援製造（CAM）に用いる器具である。

【使用方法等】**1. 使用環境条件**

使用場所：室内

温度：5～40℃

湿度：35～80%（結露のないこと）

標高：2000m まで

環境汚染クラス：2（IEC 60664-1 準拠）

過渡過電圧：1500V

2. 操作方法

- (1) 電源を接続する
- (2) ワークを取り付ける
- (3) ツール（ミリングバー）を取り付ける
- (4) コンピュータから加工データを送信する
- (5) 加工開始

【使用上の注意】

- ・本機を患者環境内で使用しない事
- ・本機の重量に耐えうる場所に設置すること
- ・精密機器のため、取扱いには十分注意すること

【保管方法及び有効期間等】

- ・水のかからない屋内に保管する事
- ・傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意して保管する事
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない事
- ・歯科医療従事者以外が触れないようにする事

【保守・点検に係る事項】

適切な保守点検及び修理が行われた場合に限り 5 年間とする（自己認証）。ただし、耐用期間は使用条件、使用環境により差が生じる事があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者**

名称：熙臣国際株式会社

住所：東京都北区豊島 5-4-1-113

電話番号：03-6789-7591

製造業者

名称：Shenzhen UP3D Tech Co., Ltd.

中国

取扱説明書を必ずご参照ください。