

医療用品(3)手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(70976000)

Umio to ニトリル手袋


再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・本製品は未滅菌品です。
- ・パウダーフリー
- ・左右同一型(平手タイプ)
- ・原材料:ニトリルゴム(NBR)
- ・色は2色(ブルー・ホワイト)

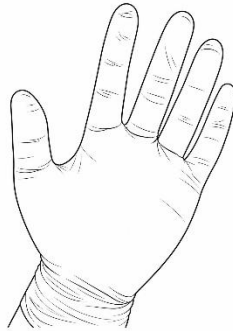

●XS、S、M、L、LLの5サイズ

【使用目的又は効果】

本製品は、手術を除いた検査、検診、診察、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。

【使用方法】

箱を開封し、
本品を取り出して左右の手に装着してください。

【使用上の注意】

■ 1. 基本的注意

- ・本品は単回使用とし、複数の患者への再使用はしないでください。
- ・合成ニトリルゴムにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等の症状がまれに生じることがあります。異常が現れた場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- ・包装に破損・汚損がある場合、またはピンホールや異物混入等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・刃物などの鋭利な器具に接触すると、破損や穴あきの原因となりますのでご注意ください。
- ・使用後は感染防止に配慮し、安全な方法で廃棄してください。

■ 2. 相互作用

- ・薬品や溶剤の種類によっては、膨潤や浸透が生じる場合があります。使用前に適合性をご確認ください。

【保管方法および使用期間】

■ 1. 保管方法

- ・水濡れを避け、直射日光、オゾン、高温多湿の環境を避けて、常温で保管してください。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所での保管は避けてください。

■ 2. 使用期間

- ・適切な保管条件下において、製造後5年間(製造元データに基づく)使用可能です。
- ・使用期限は外箱に記載されています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[外国製造販売業者]

業者名:ZJZD Medical Co., Ltd

国名:中華人民共和国

製造販売業者

名称:熙臣国際株式会社

住所:東京都北区豊島5-4-1-113

電話番号:03-6789-7591