

添付文書

2024年1月（第1版）

医療機器製造販売届出番号：46B3X10006000001

医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 液体包帯（JMDN：33584000）

キュアスプレー

【禁忌・禁止】

- 使用目的以外の用途で使用しないこと。
- 本剤に配合された原材料に対し、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用をしないこと。
〔本剤に対しても過敏症を示すおそれがあるため〕

【形状・構造及び原理等】

- 概要
本剤は、皮膚の傷、炎症、出血部位を保護する半液体状の材料である。主には皮膚の傷を保護する目的に使用する。
- 形状・構造
白色の半液体状。
- 原材料
リン酸カルシウム、アガロース、純水
- 原理
アガロースの繊維上にリン酸カルシウムが結晶化しているゲルを粉碎し、純水で希釈している。傷の表面にリン酸カルシウムアガロースの粒子が付着する。これにより、皮膚の傷、炎症、出血部位を保護することができる。

【使用目的又は効果】

本剤は、皮膚の傷、炎症、出血部位を保護する半液体状の材料である。一時的又は短期的に使用する。

【使用方法等】

- 使用前の準備
 - 滅菌包装に破れや破損が無いことを確認する。
 - スプレーボトルを滅菌包装から取り出す。
 - スプレーボトルをよく振る。
- 使用中の操作
 - スプレーボトルを皮膚の創傷部位に向ける。
 - 創傷部位から数センチ離し数回スプレーする。
- 用法について
 - 本剤の使用後、必要に応じて湿潤環境を保てる創傷被覆材で適用部位を保護する。
 - 塗り直しする場合は本剤を除去することなく、適用部位をよく洗浄し使用する。

＜使用方法に関連した使用上の注意＞

- 本剤は一時的又は短期的の使用を前提としている。長中期的に使用しないこと。
- 本剤は皮膚の傷口表面への適用を意図している。
- 本剤は週2回を目安に皮膚の状態により週1～3回使用する

- 本剤の使用は1日3回までを限度とする。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 使用開始前に滅菌包装に破損を認めた場合は使用しないこと。
- 本剤の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を認めた場合はすぐに使用を中止すること。
- 本剤が万一、目に入った場合には違和感をおぼえることがあるため、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。
- 本剤の主成分が均一にまじり合うようにスプレーボトルをよく振って使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
冷暗所に保存。
開封後は蓋をし、2～8℃の冷暗所に保存すること。
- 有効期間：2年（開封前）
開封後は4か月以内に使用すること。開封後の使用期間内においても異物や変色が見られた場合は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社キュア薬品

鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番40号

鹿児島大学産学交流プラザ1

電話：099-285-8193

製造業者：株式会社キュア薬品

鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番40号

鹿児島大学産学交流プラザ1

電話：099-285-8193