

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード：70757000

FINESIA 技工用器具

【形状・構造及び原理等】

- (1) 本製品は、F I N E S I A インプラントシステム専用の技工パーツである。F I N E S I A インプラントシステムの上部構造を作製する際に使用される。
- (2) サイズ等については外装の表示ラベルに記載されている。
- (3) 形状・材質は下記の通り。

・ B L の上部構造作製用

製品名	外観	材質
B L アナログ FBL-ANALOG		チタン合金
B L ラボスクリュー FBL-LAB SCREW		チタン合金

・ B L ダイレクトアバットメントを用いた上部構造作製用

製品名	外観	材質
B L ダイレクト アバットメント アナログ FBL-D ANALOG		チタン合金
B L バーンアウト キャップ FBL-B OUT CAP	 S T R (単冠用) (連冠用)	POM(ポリオキシ メチレン)

・ B L スプリントアバットメントを用いた上部構造作製用

製品名	外観	材質
B L スプリント アバットメント アナログ FBL-SP ANALOG		チタン合金
B L スプリント アバットメント ラボスクリュー FBL-SP LAB SCREW		チタン合金
B L S P ポリッ シングプロテクター FBL SP PL PROTEC		ステンレス鋼

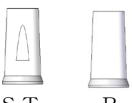
・ B L / T L ボールアバットメントに接続する義歯作製用

製品名	外観	材質
ボール アバットメント アナログ F-BALL AB ANALOG		チタン合金

・ T L の上部構造作製用

製品名	外観	材質
T L アナログ FTL-ANALOG		チタン合金
T L ラボスクリュー FTL-LAB SCREW		チタン合金
T L アングル アバットメント ラボスクリュー FTL-AN LAB SCREW		チタン合金
T L ポリッシング プロテクター FTL-PL PROTEC		ステンレス鋼

・ T L ダイレクトアバットメントを用いた上部構造作製用

製品名	外観	材質
T L ダイレクト アバットメント アナログ FTL-D-ANALOG		チタン合金
T L バーンアウト キャップ FTL-B OUT CAP	 S T R (単冠用) (連冠用)	POM(ポリオキシ メチレン)

・ T L スプリントアバットメントを用いた上部構造作製用

製品名	外観	材質
T L スプリント アバットメント アナログ FTL-SP ANALOG		チタン合金
T L スプリント アバットメント ラボスクリュー FTL-SP LAB SCREW		チタン合金
T L S P ポリッ シングプロテクター FTL-SP PL PROTEC		ステンレス鋼

＜原理等＞

本製品はフィクスチャーの上部構造を作製する際に単独又は他の製品と組み合わせて使用される。

【使用目的又は効果】

本製品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料である。

【使用方法等】

本製品には専用器具が用意されている。他パーツとの組み合わせ等の際には、専用器具を使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- (1) 詳しい使用方法については、取扱説明書（F I N E S I A マニュアル）を参照すること。
- (2) バーンアウトキャップにオートクレーブ等による高温滅菌は行わないこと。[製品が熱により変形する恐れがある。]
- (3) ポリッシングプロテクターは、研磨作業により消耗する。嵌合辺縁部に消耗が見られる場合は、新しい製品と取り替えること。
- (4) 作業中にポリッシングプロテクターを固定しているスクリューが緩み、鋳造体から外れる可能性がある。研磨作業においては、必ずスクリューを締め付け、ポリッシングプロテクターが固定されている事を確認して使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者**

京セラメディカル株式会社

TEL : 0120-923725