

## 添付資料 1

※ 2017年 6月 1日 (第2版) (新記載要領に基づく改訂)  
2005年 4月 1日 (新様式第1版)

届出番号 27B3X00059000005

医04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

# カネクラカットメン

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

### 【使用目的又は効果】

薬剤を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

1. 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
2. 体内に留置しないこと。
3. 使用後は、感染防止に留意し衛生的に処置してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ケアライフ・メディカルサプライ株式会社  
大阪府堺市西区浜寺石津町西2丁1番6号  
TEL072-241-8171

※ <http://www.care-life.co.jp/>