

添付資料 1

※ 2017年 6月 1日（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B3X00059000011

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

滅菌カネクラプライガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼをそのまま又は重ねて折り畳んだ布状繊維で、滅菌バックで包装しEOG滅菌したものである。

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・ 重要な基本的注意
- 1. 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 2. 滅菌製品の為、開封後は全量消費して下さい。
- 3. 体内に留置しないこと。
- 4. 使用後は、感染防止に留意し衛生的に処置して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
※水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. ※有効期限
滅菌バックに記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ケアライフ・メディカルサプライ株式会社
大阪府堺市西区浜寺石津町西2丁目1番6号
TEL072-241-8171
※ <http://www.care-life.co.jp/>