

機械器具29電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナ 70654000

クリニート

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済である。

〈形状〉

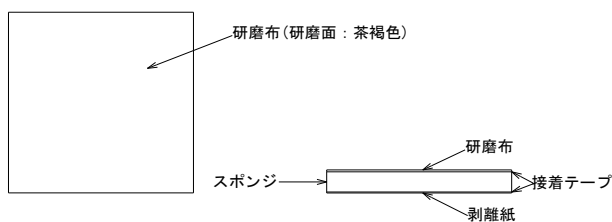

〈原理〉

本品の研磨布(面)に電気メス、ピンセット先を擦り合わせることで、手術使用時に発生する異物の除去をすることが可能である。

【使用目的又は効果】

電気メス・ピンセットのバイポーラ、モノポーラの使用時に発生する異物の除去に用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

以下の使用方法是一般的な使用方法である。

〈モノポーラの場合〉

剥離紙を剥いで接着面を手術台に貼り付ける。
メス先をヤスリ部に2～3回擦りつけ、異物の除去を行う。

〈バイポーラの場合〉

剥離紙を剥いで本品を山型にし、接着面を作業台に貼り付ける。
山型のところにピンセットを挟んで、2～3回引っ張るように擦りつけ、異物の除去を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

異物の除去後は、メス並びにピンセット先を消毒用アルコールにて清拭すること。

【使用上の注意】

〈不具合・有害事象〉

その他の不具合

破損。

[下記の原因のような原因による破損]

- ・鉗子、はさみ、その他器具での損傷。
- ・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔に保管すること。

〈有効期間〉

適正な保管方法が保たれていた場合、個包装に記載の使用期限を参照のこと。

[自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

クリエートメディック株式会社

電話番号：044-577-7793