

類別：機械器具 (32) 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000

再使用禁止

ヨックスディスポ用ライナー

＊ ＊

＊ 【禁忌・禁止】


＊ ＊ 再使用禁止

- ＊ ・本品を使用する前には必ずヨックスディスポ S701、ヨックスデュアル S503、ヨックスディスポ S711、ヨックスデュアル S513 の取扱説明書及び添付文書をよく読み、理解された上で、正しく使用すること。（記載事項に従わないと重大な事故に結びつくことがあります。）
- ＊ ・本品は、ヨックスディスポ S701、ヨックスデュアル S503、ヨックスディスポ S711、ヨックスデュアル S513 に使用する専用のライナーです。他に使わないこと。（正常な機能や安全を保てなくなる。）
- ＊ ・本品は、ヨックスディスポ S701、ヨックスデュアル S503、ヨックスディスポ S711、ヨックスデュアル S513 のキャニスターボトルにセットし外科手術や治療などで生じる血液、たん、生理食塩水などの汚物を吸引し、固化させる汚物収集バッグです。（再使用は行わないでください。感染の原因になります。）
- ＊ ・本品は、樹脂製品です。穴を開けたり、高温にさらしたりしないでください。（汚物の飛散、作動不良によるアウトレットバルブへの吸引などにより感染の原因になります。）
- ＊ ・本品内の汚物が 1200mL、500mL の「FULL LEVEL」になる前に吸引を中止すること。（満杯まで吸引すると、医療ガス配管設備及びアウトレットバルブが汚物により汚染されることがあります。）
- ＊ ・本品は、ディスポーザブル製品です。（ライナーの再利用は絶対しないこと。）
- ＊ ・本品をキャニスターボトルにセット後、コントローラーのハンドルの「赤ライン」の位置を目盛「10」に合せペイシェントホースの先端で吸引できることを必ず確認してから使用すること。（正常な機能や安全を保てなくなる。）
- ＊ ・当社の純正部品以外は使用しないこと。（正常な機能や安全を保てなくなる。）
- ＊ ・容積 500mL のライナーは 1200mL 用のキャニスター又はヨックスデュアル S503、ヨックスデュアル S513 に使用しないこと。（吸引漏れやライナーの破れが発生する恐れがあります。）

【形状・構造及び原理等】

本品は、バッグ及び凝固剤から構成されており、ヨックスディスポ S701（届出番号 10B2X00014C00005）、ヨックスデュアル S503（届出番号 10B2X00014C00004）、ヨックスディスポ S711（届出番号 10B2X00014C00011）もしくは、ヨックスデュアル S513（届出番号 10B2X00014C00012）に使用するライナーである。

1. 形状

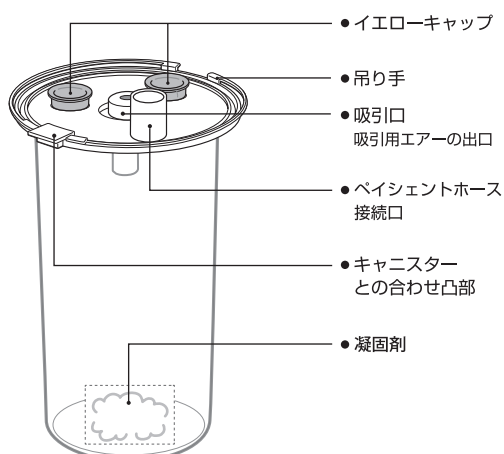

- ① 1200mL
寸法：φ 95 × 高さ 210 mm (A)
容積：1200 mL（ライナー実内容積 1200 ± 100mL）
重量：135 ± 10 g
- ② 500mL
寸法：φ 95 × 高さ 135 mm (A)
容積：500 mL（ライナー実内容積 500 ± 100mL）
重量：96 ± 10 g

2. 原理

真空吸引器（ヨックスディスポ S701、ヨックスデュアル S503、ヨックスディスポ S711、ヨックスデュアル S513）からの吸引圧により、体液等の汚物を吸い込みライナーに貯留させる。貯留された体液が満杯になると吸引が停止する。又、汚物が凝固剤に触れると、汚物が凝固される。

3. 性能

入口吸引圧力 0 ～ - 60 kPa

【使用目的又は効果】

本品は、体液回収を目的とし吸引器とともに使用する吸引器用キャニスターである。


＊ ＊

＊ 【使用方法等】

1. 使用準備

- 1) ライナーをキャニスターにセット
①ライナーを用意する。
②本体のキャニスターヘッドを外しキャニスターにライナーを差し込む。
③ライナーの凸部とキャニスターホルダーの凹部を合せ差し込む。

＊ ＊

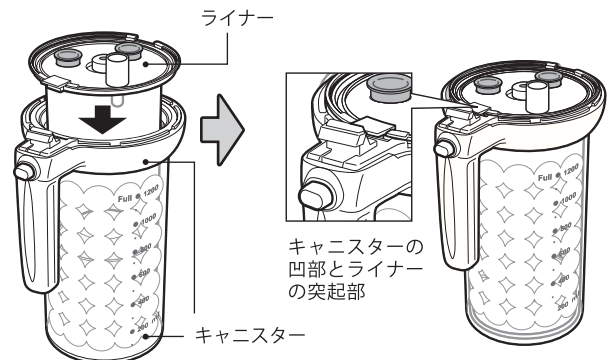


④キャニスターヘッドをセットする

2. キャニスターヘッドとキャニスターのセット

- ①ボトルホルダーの突起部をキャニスターヘッドのヒンジ窓に差し込む。
②キャニスターヘッドを「パチン」と音がするまで押し下げる。（セット品をキャニスターセットと言う）

＊ ＊

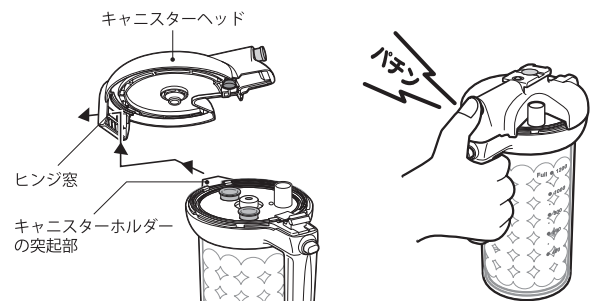

3. ネオ・コントローラーにキャニスターセットを接続する。

- ①キャニスターヘッドのガイドとネオ・コントローラーのガイドを合せ、「カチッ」と音がするまでスライドさせる。

2. 操作方法

- 1) ネオ・コントローラーにキャニスターセットを接続した状態でネオ・コントローラーの背面のハンガーをアウトレットパネルに取り付ける。
- 2) アダプターホースのアダプターを吸引アウトレットに差し込む。

3) ペイシェントホースをライナーに接続する。

4) 吸引の確認

- ①ネオ・コントローラーのハンドルを時計方向に回転させ目盛「10」程度に設定する。
- ②キャニスター内のライナー内に吸引圧が作用し、ライナーが膨らみます。吸引はOKです。
- ③ライナーがしぼんでしまった場合は、部品を確認し再度セットします。

** ④ (文章削除) ペイシェントホースの先端を水に入れるかペイシェントホースの先端に親指の腹を当て吸引ができるか確認する。

⑤ハンドルを必要とする吸引圧に設定し、ペイシェントホースの先端から吸引する。


5) 吸引の開始

- ①コントローラーのハンドルの「赤ライン」を目盛に合せ吸引を開始する。
- ②コントローラーのハンドルの「赤ライン」を必要とする目盛に合せると目盛の吸引圧でペイシェントホースの先端から吸引する。
- ③吸引を開始するとキャニスター内のライナー内に吸引圧が作用し、ライナーが膨らみペイシェントホースの先端から吸引できますが、ライナーがしぼんでしまった場合は、部品を確認し再度セットする。

6) 吸引の中断及び停止


- ①吸引を一時的に中断したいとき、又は短時間使用しないときにはネオ・コントローラーのハンドルを「OFF」にする。
- ②使用後は速やかにライナーからペイシェントホースを外し、キャニスターセットのグリップを握り、キャニスターヘッドの「カラーボタン」を押し、ネオ・コントローラーからキャニスターセットを外す。

**

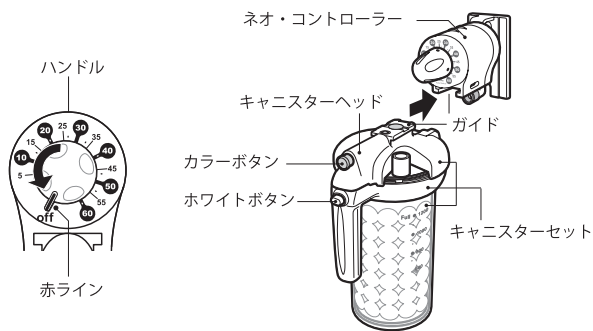

3. 汚物の処理 (廃棄処理)

- 1) キャニスターセットを机上に置きキャニスターホルダーのグリップを握り「ホワイトボタン」を押しキャニスターヘッドを外す。
- 2) ライナーの「吸引口」と「ペイシェントホース接続口」を付属の黄色キャップで密閉し、ライナー吊り手を持ってキャニスター内のライナーを抜き取る。
- 3) ライナーを所定の処理場所に廃棄する。

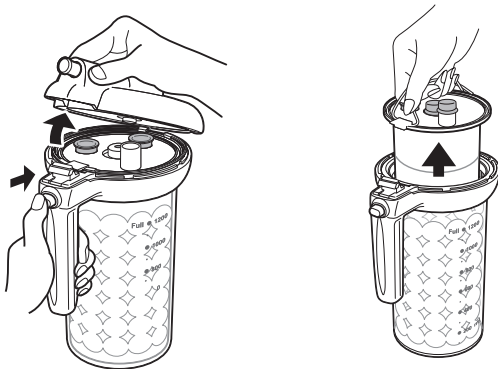

【使用上の注意】

- 1) ライナーとキャニスターボトル及びキャニスターヘッドは確実にセットすること。
- 2) チューブ類を抜き差しするときに無理な力を掛けないこと。
 - ①ライナーのセットは机上で行う。
 - ②ライナーは確実にセットすること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) ライナーはポリ袋などに収納し、所定の保管場所にて保管すること。
- 2) 保管場所の条件: 高温、ほこり、水、湿気等がない場所であること。温度、ほこり、湿度、風通し、塩分、いおう分等を含んだ空気等により、悪影響の生じるおそれのない場所であること。化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。

【取扱い上の注意】

ライナーを転倒及び落下等の衝撃を加えないでください。

【保守・点検に係る事項】

ライナーは使用前に必ず下記のことを目視で確認してください。

- 1) ライナーに亀裂、損傷および変色、劣化、落下等による変形等がないか。
- 2) ライナー内にセット部品が外れておちていないか。
- 3) ライナー内に凝固剤等の部品がセットされていること。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 群馬コイケ
〒 372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町 222-1
TEL 0270 - 32 - 4318

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 群馬コイケ
TEL 0270 - 32 - 4318