

器 11 : 放射線障害防護用器具
一般医療機器 : 放射線防護用移動式バリア 38373000

キョウワグラス XA 防護衝立

【形状、構造及び原理等】

- 本防護衝立は、含鉛アクリル板及び／または、鉛入りパネルをX線遮蔽材料とする平面ないしは湾曲面の自立する衝立である。複数の平面を連結した衝立とする場合もある。衝立は、上部を含鉛アクリル板、下部を鉛入りパネルとするものを基本とするが、全面を含鉛アクリル板とする衝立や全面を鉛入りパネルとする衝立もあり、含鉛アクリル板には開口部を設ける場合もある。平面衝立の側面に含鉛アクリル板の袖を付ける場合がある。衝立を移動させ易いよう脚部にキャスターを取り付けたモデルとキャスターのないモデルがある。
- 製品を構成する「含鉛アクリル板」及び、「鉛入りパネル」及び「防護クロス」(含鉛シート)をX線防護バリアとする。

<外観形状(代表例)>



【使用目的又は効果】

X線診察室等において医師・看護師・技師などの医療従事者等を放射線の被ばくから防護することを目的とする。

【使用方法等】

X線撮影装置やFDG投与装置(FDF投与後の患者を含む)などの放射線発生源と、医療従事者との間に設置する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 可燃性の含鉛アクリル板を使用しているため、保管および取り扱いには着火源から離れたところで行うこと。また、アルコール性物質により変質する可能性があるため、清拭の際は注意すること。
- 殺菌灯の照射は、表面の劣化の原因となることがあるため、避けること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 常温・常湿

耐用期間: 10年 [自己認証(当社データ)] による。

【取扱い上の注意】

- 製品の清掃には、拭いた部分が白く曇ったり、キズがつくことがあるので、シンナーやベンジンなどの溶剤や、コンパウンドなど研磨剤を含むものを使用しないこと。
- 製品に損傷を与える恐れがあるので、金属やゴムに対して強い腐食性を持つ塩素系消毒剤、または消毒剤の取扱説明書に金属・プラスチック・ゴム及び塗装のうち一つでも使

用が不適と注意書きのある消毒剤を使用しないこと。

- 製品の消毒は最小限にするよう心がけること。長時間の消毒により、外装に退色やひび割れが起こる場合や、ゴムやプラスチックが劣化する場合がある。もし、消毒により変化が現れた場合は、直ちに製品の使用を中止し、購入業者に修理を依頼すること。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検(日常点検)>

血液が付着した場合、適切な消毒を行うこと。ただし、アルコール性物質により変色する可能性があるため、清拭後は長時間放置せず、柔らかい布で拭き取る等注意すること。

【主要文献及び文献請求先】

クラレトレーディング株式会社

電話番号 06-7635-1786 エックスエー製品部

**

*【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者

クラレトレーディング株式会社

大阪府大阪市北区角田町8番1号

*大阪梅田ツインタワーズ・ノース

電話番号 06-7635-1786 **エックスエー製品グループ

製造業者

株式会社ダイケン