

＊ ＊ 2023 年 4 月 1 日（第 3 版）
＊ 2022 年 4 月 20 日（第 2 版）

製造販売届出品目番号 27B3X00309XA0007


器 11 : 放射線障害防護用器具
一般医療機器 : 放射線防護用移動式バリア 38373000

CT 用放射線シールド

【形状・構造及び原理等】

- (1) 本品は、湾曲した透明性のあるシールド(含鉛アクリル)、シールド用架台、患者用寝台より構成されており、CT撮影装置の天板に設置して使用する。
- (2) 被験者を覆うシールド(含鉛アクリル)はX線を遮蔽する機能を有しているため、このシールドで被験者を覆うことにより、被験者からの散乱X線が遮蔽され、医療従事者の被ばくを低減することができる。

＜外観形状＞

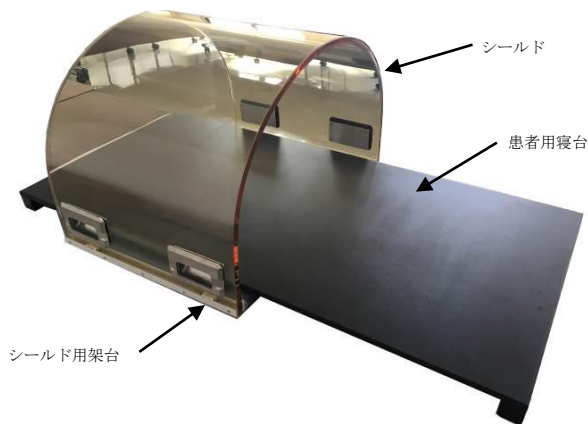

【主要文献及び文献請求先】

クラレトレーディング株式会社
電話番号 06-7635-1786 エックスエー製品部

＊ ＊

＊ 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者

クラレトレーディング株式会社

大阪府大阪市北区角田町 8 番 1 号

*大阪梅田ツインタワーズ・ノース

電話番号 06-7635-1786 **エックスエー製品グループ

製造業者 株式会社ダイケン

【使用目的又は効果】

本品で CT 撮影を行う被験者を覆うことにより被験者からの散乱X線を遮蔽し、医師・看護師・技師などの医療従事者をX線被ばくから保護する。

【使用方法等】

- (1) 本品を CT 撮影装置の天板に設置し、シールドで被験者を覆う。
- (2) 必要に応じて、シールドの位置調整を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) 可燃性の含鉛アクリル板を使用しているため、保管及び取扱いは着火源から離れたところで行うこと。また、アルコール性物質により変質する可能性があるため、清拭の際は注意すること。
- 2) 殺菌灯の照射は、表面の劣化の原因となることがあるため、避けること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：常温・常湿

耐用期間：10年 [自己認証（当社データ）]による。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検（日常点検）＞

血液が付着した場合などのため消毒が必要になった場合は、適切な消毒作業を行うこと。ただし、アルコール性物質により変質する可能性があるため、清拭の際は注意すること。また、清拭後は長時間放置せず、柔らかい布で拭き取ること。