

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

## ノリタケ ハイテック フィニッシュ

### 【警告】

本品は、回転数30,000rpmを越えて使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

- 形状：直径2.34mm×長さ50mm
- 成分：アルミナ長繊維、エポキシ樹脂
- 原理  
アルミナを主成分とする技工用研削材。

品名	ブラウン	ブルー	レッド
粒度	#300 相当	#800 相当	#1,200 相当

### 【使用目的又は効果】

- 本品は、メタルクラウンの溝及びその周辺の研削に使用します。
- また、メタルクラウン及びセラモメタルクラウン内面の気泡の除去、インプラント上部構造体のアクセスホールの拡大、アクセスホールの形態修正、メタルプレートのフィニッシンググライン及びクラスプ内面の気泡を除去する場合に使用します。

### 【使用方法等】

#### 使用方法

- ①本品は、研削用途に応じて、ブラウン(粗目)、ブルー(中目)、レッド(細目)の3タイプありますので、適当なタイプを選択します。
- ②ダイヤモンドドレッサー等で、本品の先端を尖らせて研削します。

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①本品は、口腔内では使用しないこと。
- ②本品を使用する際、ハンドピースメーカーの指定にしたがって、確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ③本品の使用前にハンドピースの予備回転を行い、振れ、ゆるみがないことを確認すること。
- ④本品は、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

### \*【使用上の注意】

#### 1. 使用注意

- ①必要に応じ、本品を使用後はただちに清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去すること。

#### 2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用により、発疹・皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し医師の診断を受けること。
- ②本品はアルミナを含有する。遊離アルミナは長期にわたって吸入すると肺が損傷される可能性があるため、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置或いは公的機関が認定した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ③本品を使用する際は、目の損傷を防ぐため保護メガネ等の保護具を使用すること。万一目に入った場合は、ただちに大量の流水で洗眼し、医師の診断を受けること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ・本品は、高温多湿、直射日光を避け室温に保管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

**クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

フリーダイヤル：0120-330922

販売元：

**株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL (06) 6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL (03) 3834-6161