


機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

クリアフィル® ディスペンサー

**【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

オートミックスタイプの専用シリンジ(10mL)※1に取り付けて使うプラスチック製のディスペンサーである。本品のハンドルを握ることにより容易に専用シリンジ内のペーストを押し出すことができる。

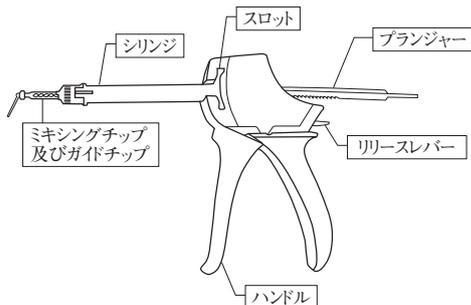

※1 クラレノリタケデンタル株式会社が製造販売する製品の電子添文にて、併用する器材として本品が記載されている製品のシリンジ。
※2 シリンジ、ミキシングチップ及びガイドチップは別売

【作動・動作原理等】

本品のハンドルを握ることによりプランジャーが前進し、装着した専用シリンジ内のペーストを押し出す。


【使用目的又は効果】

【使用目的】


歯科材料を練和し、注入するために用いる器具。

【使用方法等】

- ①本品や本品に取り付ける製品等に破損等の異常がないことを確認します。
- ②本品後部のリリースレバーを押し上げて、本品のプランジャーを最後部まで引き戻します。
(リリースレバーを押し上げるにより、プランジャーは自由に動かすことができます。)
- ③専用シリンジ本体のプランジャーを引き抜きます。
(専用シリンジのプランジャーは簡単に抜け落ちないような構造になっておりますので、引き抜く時は若干抵抗を感じます。)

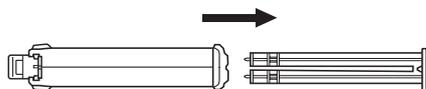

- ④本品の溝の形と専用シリンジの形が合う向きに方向を揃えて、本品に専用シリンジを取り付けます。この時に、カチッと音が鳴るまで専用シリンジを挿入します。
(本品と専用シリンジは一方方向にのみ取り付けられるようになっております。)

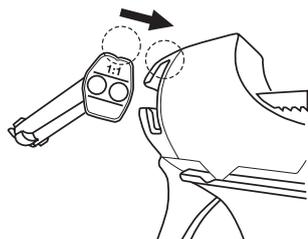

- ⑤ハンドルを握って専用シリンジ内のペーストを少量押し出し、均等に出ることを確認します。片方しか吐出されない場合は、均等になるまでペーストを押し出してください。
- ⑥本品に取り付ける製品の電子添文等にしたい、ミキシングチップ及びガイドチップをシリンジに装着します。
- ⑦本品のハンドルをゆっくりと握り込み、必要量のペーストを押し出します。
- ⑧使用後は、本品後部のリリースレバーを押し上げながら本品のプランジャーを最後部まで引き戻した後、専用シリンジをスライドさせて本品から外します。専用シリンジが外れない場合は、再度リリースレバーを押し上げながら本品のプランジャーを引き戻し、本品のプランジャーが完全に引き戻されていることを確認ください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ペーストの押し出し時には、専用シリンジの破損及びそれに伴う内容物の飛散を防ぐため、過度な力でハンドルを握らないようにし、常に優しく操作すること。
- 2) ペーストの押し出し中にペーストが硬化しているように感じられた場合は、無理にペーストを押し出そうとせずにミキシングチップやガイドチップを交換してから使用すること。

**【使用上の注意】

* (1) 使用注意

- ①本品に専用シリンジを取り付ける際及び取り外す際、又は本品を操作する際には、術者の手指及び患者を傷つけないように注意すること。
- ②本品の使用時には交差感染に気をつけること。本品の使用前後にはアルコールを含ませた脱脂綿等で消毒を行うこと。
- ③本品から取り外した製品は、その製品の電子添文に記載の保管方法にしたがって保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28
フリーダイヤル:0120-330922

**製造元:

Medmix China Ltd
国名 中華人民共和国

販売元:

株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
TEL(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL(03)3834-6161

「クリアフィル」は株式会社クラレの登録商標です。