



機械器具 51 医療用嚢管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテル等保持用ホルダ 15735000

COOK ムーバブルスーチャウイング

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止[品質が劣化するおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、スーチャウイング(①)及びスーチャウイングクランプ(②)の2つの部品からなる。

①スーチャウイング

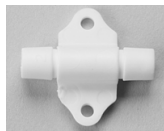

②スーチャウイングクランプ



2. 組成

- ①スーチャウイング: 熱可塑性エラストマ
- ②スーチャウイングクランプ: ポリカーボネート

3. 原理

本品は、患者に留置した静脈用カテーテルまたは静脈用カテーテルに接続されたチューブ上に取り付け、患者の身体上に縫い付けることで静脈用カテーテル等を患者の身体上に固定し、偶発的な移動及び脱落を防ぐ。

【使用目的又は効果】

本品は、留置する静脈用カテーテルまたは静脈用カテーテルに接続されたチューブの偶発的な移動及び脱落を防止するために患者の身体上に固定するために使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① スーチャウイングのウィングを広げ、カテーテル(構成品外別品目)の適正な先端位置が保たれるように、スーチャウイングをカテーテルシャフトの適切な位置にはめ込む(図1)。
- ② スーチャウイングクランプをスーチャウイングの上に取り付ける(図2)。
- ③ カテーテルが外れないように、スーチャウイング及びスーチャウイングクランプを一緒に左右のウィング部において皮膚と縫合し、カテーテルを患者の身体上に固定する(図3)。

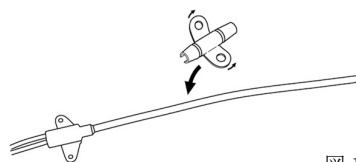


図 1

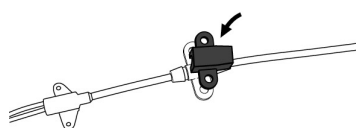


図 2

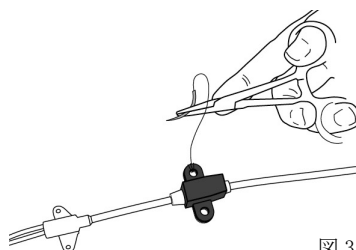


図 3

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿及び光(日光、蛍光灯、紫外線殺菌装置)を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

* クックメディカルジャパン合同会社
連絡先 TEL:0120-289-902

《外国製造業者》

クック インコーポレイティッド (アメリカ合衆国)
Cook Incorporated