



一般医療機器

機械器具 25 医療用鏡

内視鏡用部品アダプタ

37090010

COOK フュージョンガイドワイヤーロックングデバイス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止 [品質が劣化するおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



品番	適合内視鏡
FS-WL-O-S	オリンパス製、フジノン (FTS) 製
FS-WL-P-S	ペンタックス製

2. 原理

本品は、内視鏡的胆管用医療機器と共に使用され、内視鏡的逆行性胆道膵管造影法(ERCP)での手技において、ガイドワイヤーを固定するために用いるアクセサリーである。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡的胆管用医療機器と共に使用され、内視鏡的逆行性胆道膵管造影法(ERCP)での手技において、ガイドワイヤーを固定するために用いるアクセサリーである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① 矢印の箇所を指で押しながら(図1)、本品を内視鏡の鉗子チャンネルに確実に取り付け(図2)。

図1


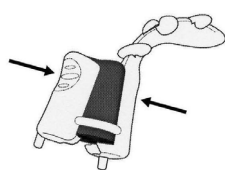


図2

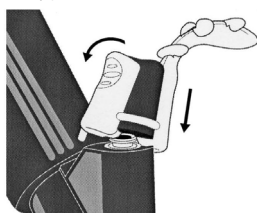

- ② 必要に応じて本品のキャップに水溶性潤滑剤を塗布する。これにより、本品にガイドワイヤー等のデバイスを通し易くなる。
- ③ ガイドワイヤーを固定するには、図3及び4のように、ガイドワイヤーを通す。

図3


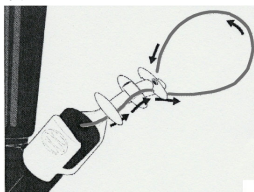


図4

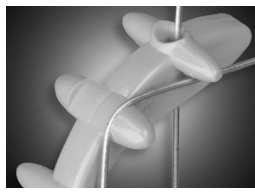

- ④ ガイドワイヤーの固定を外す時は、手順3の操作を逆に行う。
- ⑤ 矢印の箇所を指で押しながら(図5)、本品を内視鏡の鉗子チャンネルから取り外す(図6)。

図5


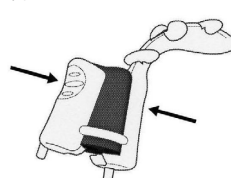


図6

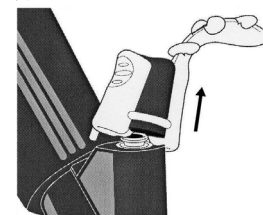

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) ガイドワイヤー固定部にガイドワイヤーを通す時には、ガイドワイヤー固定部の溝にガイドワイヤーを確実にめ込んで外れないようにすること。
- 2) 操作中に抵抗を感じた場合は、操作を中断し抵抗の原因を取り除くこと。[無理に操作した場合、本品や本品と共に使用するデバイス、あるいは内視鏡の破損につながるおそれがある]
- 3) 併用するガイドワイヤーは、挿入する前に滅菌水、又は生理食塩水に浸し、十分に濡らした状態で使用すること。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

- 1) 重大な不具合
 - (1) 本品の破損

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射光を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

* クックメディカルジャパン合同会社

連絡先 TEL: 0120-289-902