



一般医療機器

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
カテーテルコネクタ

32339000

COOKコネクティングチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 材質

塩化ビニル

3. 原理

本品は、一端にオス型ルアーロックコネクタを持ち、もう片端にメス型ルアーロックコネクタを持つカテーテルコネクタである。シリンジや指定の内視鏡用カテーテルに接続し、容易に造影剤や生理食塩水等を体内へ注入することができる。

【使用目的又は効果】

カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテルを身体に挿入するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品のオス型ルアーロックコネクタと指定の内視鏡用カテーテルを接続し、またメス型ルアーロックコネクタとシリンジを接続し、造影剤や生理食塩水等を体内へ注入する。

2. 併用する医療機器の例

販売名: パピロトミーナイフ

承認番号: 15900BZY00883000

一般的名称: 単回使用内視鏡用能動処置具

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品納入時に包装が開封されていたり、破損のある場合は使用しないこと。
- 2) 本品は単回使用である。再処理、再滅菌、また再使用は、機器の不具合または患者の疾病を引き起こさせる可能性がある。
- 3) 併用する医療機器の添付文書及び取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

クックメディカルジャパン合同会社

連絡先 TEL: 0120-289-902