



機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

アダプタ (ルアーロックアダプタ、サイドアームアダプタ)

再使用禁止

【警告】

- 1) 本品に過剰な力を加えないこと。[本品が損傷するおそれがある]
- 2) 本品使用中に異常が認められたときは、速やかに使用を中止し、適切な処置を施すこと。[重篤な健康被害が発生するおそれがある]

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止[品質が劣化するおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

- 本品はアダプタ単品である。
- 詳細は製品ラベルに記載のとおり。

①ルアーロックアダプタ



ルアーロックアダプタ
(大型フィッティング用)




メス型ルアーロックキャップ



尿管カテーテルコネクタ



トイボーストアダプタ付
オス型ルアーロック

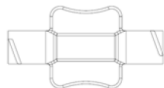

デュアルメス型ルアーロック



デュアルオス型ルアーロック




尿管カテーテルドレナージバッグ
接続用トイボーストアダプタ



ドレナージバッグ接続用アダプタ
(オス型ルアーロック付)




ドレナージバッグ接続用アダプタ
(メス型ルアーロック付)

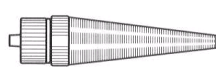

フォーリーカテーテルコネクタ
(オス型)



フォーリーカテーテルコネクタ
(メス型)

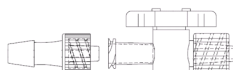

改良アダプタ付
San Antonio 活栓




小児用 Taylor アダプタ




Taylor アダプタ

②サイドアームアダプタ

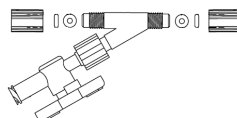


一方活栓・二方向
トイボーストアダプタ付

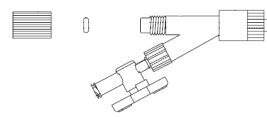

一方活栓・オス型ルアーロック・
トイボーストアダプタ付




オス型ルアーロック・トイ
ボーストアダプタ付

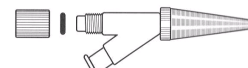

フォーリーカテーテル用
サイドアームアダプタ



トイボーストアダプタ

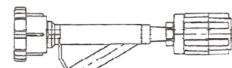

回転式サイドアーム付
トイボーストアダプタ

2. 原材料

①ルアーロックアダプタ

- ルアーロックアダプタ(大型フィッティング用)
アセタール
- メス型ルアーロックキャップ
ポリアミド
- 尿管カテーテルコネクタ
ポリアミド
- トイボーストアダプタ付オス型ルアーロック
ポリアミド/アセタール
- デュアルメス型ルアーロック
メタクリル酸メチル/ABS
- デュアルオス型ルアーロック
ポリカーボネート
- 尿管カテーテルドレナージバッグ接続用トイボーストアダプタ
ポリアミド/ポリ塩化ビニル
- ドレナージバッグ接続用アダプタ(オス型/メス型ルアーロック付)
アセタール又はポリアミド/ポリ塩化ビニル
- フォーリーカテーテルコネクタ(オス型/メス型)
ポリアミド/アセタール
- 改良アダプタ付 San Antonio 活栓
ポリエチレン/ポリカーボネート/ナイロン
- Taylor アダプタ
アセタール

②サイドアームアダプタ

- 一方活栓・二方向トイボーストアダプタ付
ポリアミド/アセタール/ポリカーボネート/ポリエチレン
- 一方活栓・オス型ルアーロック・トイボーストアダプタ付
ポリアミド/アセタール/ポリカーボネート/ポリエチレン
- オス型ルアーロック・トイボーストアダプタ付
ポリアミド/アセタール

- フォーリーカテーテル用サイドアームアダプタ
ポリアミド/アセタール
- トーイボーストアダプタ
ポリカーボネート/シリコンゴム
- 回転式サイドアーム付トーイボーストアダプタ
ポリカーボネート/シリコンゴム/サイロライト(アクリル樹脂)

3. 仕様

＜ルアーロックアダプタ＞

6.895Pa (0.001PSIG)の圧において接着部周囲に液漏れがないこと。

4. 原理

本品は、二つのカテーテル構成品を接続したり、機器同士の接続に使用する。ドレナージ用カテーテル等への接続や液流の遮断等を行い、液漏れやエアースピレーションを防止する為にも使用される。

【使用目的又は効果】

本品は、カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテルを身体に挿入するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

＜ルアーロックアダプタ＞

- ① アダプタを時計回りに回して各器具を接続する。
- ② 取外しの際には、アダプタを反時計回りに回す。

＜サイドアームアダプタ＞

- ① アダプタを時計回りに回して、サイドアームアダプタを接続する。
- ② 必要に応じ、サイドアームから薬液等を注入する。
- ③ 取外しの際には、アダプタを反時計回りに回す。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 目的に応じたサイズ、形状を選択して使用すること。
- 2) 接続が困難な場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) 本品を強酸、強塩基に類する薬剤及び有機系溶剤にさらさないこと。

2. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下のような不具合が発生する場合がある。

- 1) 重大な不具合
 - (1) アダプタやコネクタの移動、破損、断裂、キンク

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、日光・蛍光灯・紫外線殺菌装置等の光、高温及び多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は包装に表示されている。〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

* クックメディカルジャパン合同会社

連絡先 TEL:0120-289-902