



機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

アダプタ (内視鏡用キャップ)

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- 1) 本品に過剰な力を加えないこと。[本品が損傷するおそれがある]
- 2) 本品使用中に異常が認められたときは、速やかに使用を中止し、適切な処置を施すこと。[重篤な健康被害が発生するおそれがある]

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止[品質が劣化するおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

- 本品はアダプタ単品である。
- 詳細は製品ラベルに記載のとおり。

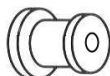

内視鏡用キャップ



ペンシルポイントホール付
内視鏡用キャップ



センタースリット付
内視鏡用キャップ



スルーホールなし
内視鏡用キャップ

2. 原材料

シリコーン

3. 原理

本品は、二つのカテーテル構成部品を接続したり、機器同士の接続に使用する。ドレナージ用カテーテル等への接続や液流の遮断等を行い、液漏れやエアアシレーションを防止する為にも使用される。

**【使用目的又は効果】

本品は、カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテル等を身体に挿入するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ①内視鏡用キャップを内視鏡の鉗子口に取り付ける。
- ②中央の穴に器具を挿入し操作する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 目的に応じたサイズ、形状を選択して使用すること。
- 2) 接続が困難な場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) 本品を強酸、強塩基に類する薬剤及び有機系溶剤にさらさないこと。

2. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下のような不具合が発生する可能性がある。

- 1) 重大な不具合
(1) アダプタやコネクタの移動、破損、断裂、キンク

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、日光・蛍光灯・紫外線殺菌装置等の光、高温及び多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

* クックメディカルジャパン合同会社

連絡先 TEL:0120-289-902