



機械器具 51 医療用尿管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ

32339000

COOK コネクティングドレナージチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品には、以下の10種類のタイプがある。

(以下、オス型ルーアーロックアダプタを MLLA、メス型ルーアーロックアダプタを FLLA と記す。)

1) タイプ 1

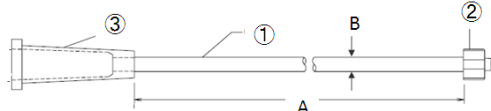


寸法

No.	A	B
	cm	mm/Fr
1-1	30	5/14
1-2	135	5/14

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	MLLA	ナイロン
③	排液アダプタ	ポリ塩化ビニル

2) タイプ 2

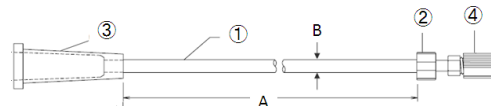


寸法

No.	A	B
	cm	mm/Fr
2-1	30	5/14
2-2	50	5/14
2-3	11	5/14

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	MLLA	ナイロン
③	排液アダプタ	ポリ塩化ビニル
④	FLLA アセンブリ	ポリアミド/ニトリル

3) タイプ 3

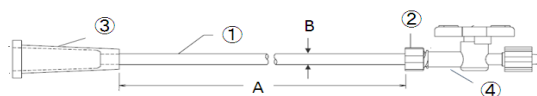


寸法

No.	A	B
	cm	mm/Fr
3-1	30	5/14

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	MLLA	ナイロン
③	排液アダプタ	ポリ塩化ビニル
④	ストップコック	ポリエチレン/ ポリカーボネート

4) タイプ 4

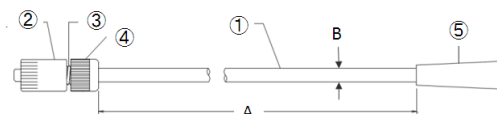


寸法

No.	A	B
	cm	mm/Fr
4-1	30	6/18
4-2	30	8/24

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	MLLA	アセタール
③	接着剤	エポキシ
④	コネクタキャップ	アセタール
⑤	排液アダプタ	ポリ塩化ビニル

5) タイプ 5

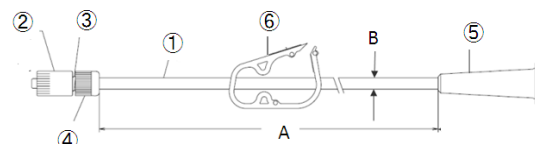


寸法

No.	A	B
	cm	mm/Fr
5-1	30	6/18

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	MLLA	アセタール
③	接着剤	エポキシ
④	コネクタキャップ	アセタール
⑤	排液アダプタ	ポリ塩化ビニル
⑥	クランプ	ポリプロピレン

6) タイプ 6

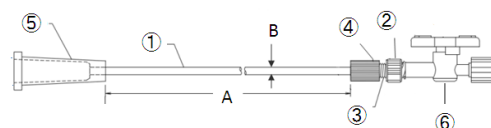


寸法

No.	A	B
	cm	mm/Fr
6-1	30	3/10
6-2	10	3/10

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	MLLA	アセタール
③	接着剤	エポキシ
④	コネクタキャップ	ポリ塩化ビニル
⑤	排液アダプタ	ポリアミド
⑥	ストップコック	ポリエチレン/ ポリカーボネート

7) タイプ 7

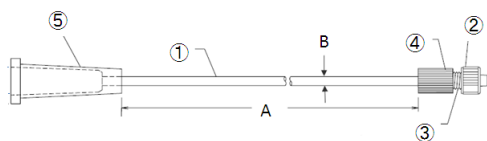


寸法

No.	A	B
	cm	mm/Fr
7-1	15	3/10
7-2	30	3/10

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	MLLA	アセタール
③	接着剤	エポキシ
④	コネクタキャップ	ポリ塩化ビニル
⑤	排液アダプタ	ポリアミド

8) タイプ 8

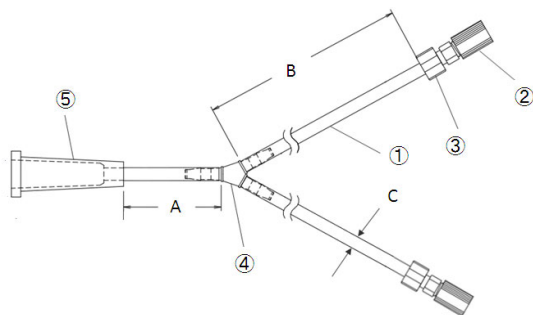


寸法

No.	A	B	C
	cm	cm	mm/Fr
8-1	5	30	5/14

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	FLLA アセンブリ	ポリアミド/ニトリル
③	MLLA	ナイロン
④	Y コネクタ	ポリプロピレン
⑤	排液アダプタ	ポリ塩化ビニル

9) タイプ 9

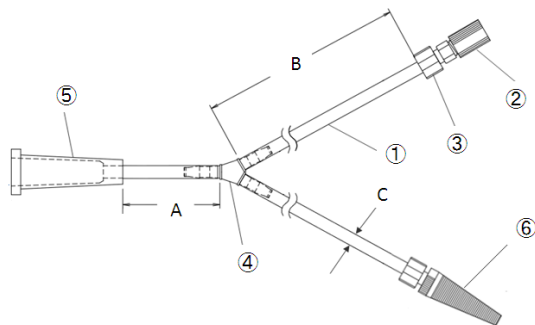


寸法

No.	A	B	C
	cm	cm	mm/Fr
9-1	5	30	5/14

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	FLLA アセンブリ	ポリアミド/ニトリル
③	MLLA	ナイロン
④	Y コネクタ	ポリプロピレン
⑤	排液アダプタ	ポリ塩化ビニル
⑥	メス型フォーリー コネクタ	ポリアミド/ アセタール

10) タイプ 10

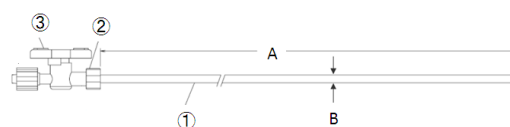

寸法

No.	A	B
	cm	mm/Fr
10-1	210	5/14

構成部品

No.	構成部品	原材料名
①	チューブ	ポリ塩化ビニル
②	MLLA	ナイロン
③	ストップコック	ポリエチレン/ ポリカーボネート

2. 原理

本品は、カテーテルと容器等の他の対象物とを接続するために使用する。チューブ末端にあるアダプタ又はコネクタ等によってカテーテル又は容器等と接続する。ストップコック及びクランプは流量を調節する。チューブにはストレート型及び Y 型がある。

【使用目的又は効果】

本品は、カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテルを身体に挿入するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品を使用してカテーテルと尿バッグ等を接続する。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

1) 重大な不具合

- (1) 本品の使用、チューブが閉塞する場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

乾燥した涼しい暗所に保管すること。長時間光に曝さないこと。

2. 有効期間

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による]

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

《製造販売業者》

クックメディカルジャパン合同会社

連絡先 TEL:0120-289-902