

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ (35531000)

プロシエ滅菌ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<材質>レーヨン/ポリエステル不織布+ポリエチレンフィルム

<滅菌方法>エチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から手術切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布の用具をいう。

本品は患者を手術中の熱、炎又は他のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

*【使用方法等】

1. 包装より無菌的に本品を取り出す。
2. 本品で患者の体表面を覆う。開窓部のあるものは、開窓部から外科切開部位や術野が露出するようにする。
3. 清潔な保持材料を用いて固定する。
4. 手技が完了したら本品を外し、廃棄する。

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・開封前に滅菌状態をよく点検し、破損、汚染、水漏れ等あるものは使用しないこと。
- ・開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。
- ・本品を医療従事者以外が使用する場合は、必ず医療従事者の指導、指示を受けること。
- ・接着剤を使用している製品については、個人差により皮膚刺激性が発生する場合がある。患者の皮膚に異常が認められた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

<その他の注意>

- ・高熱を発する医療機器、火気などに接触させないこと。
- ・使用後は、汚染物飛散に注意し廃棄すること。

*【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学製品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

<有効期間>

本品の包装に記載されている「有効期限」までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

クー・メディカル・ジャパン株式会社

TEL: 03-5577-5901

*【製造業者】

製造業者: Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd.

製造国名: 中華人民共和国

【販売業者】

アズワン株式会社 ※問合せ窓口

TEL: 0120-711-875

受付時間: 平日 9:00~17:30 (土日祝・弊社休業日は除く)