

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (16779000)
接続吸引チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本体形状 (代表例)



2. 原材料

- ・チューブ：ポリ塩化ビニル
- ・コネクタ：ポリ塩化ビニル
- ・延長パーツ：ポリエチレン

3. 滅菌方法

エチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

本品は吸引器と回収容器に接続し、体液を流通するのに用いられる接続吸引チューブである。

【使用方法等】

1. 本品に変形や破損等が無いことを確認する。
2. 本品を取り出し、吸引器、回収容器、吸引嘴管などの接続口に接続する。

【使用上の注意】

1. 使用前に変形や破損が無いことを確認し、異常が確認された場合は使用しないこと。
2. 吸引器、回収容器、吸引嘴管などに接続する際、緩みがないことを確認し、確実に接続すること。
3. 再使用しないこと。
4. 不適切な使用をしないこと。
5. 本品廃棄の際は医療産業廃棄物として各地域条例に従い処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・寒冷、高温、直射日光の当たる場所を避けて、清潔な環境下で保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、紫外線、ほこり、塩分やイオウ等を含んだ空気などにより悪影響の生じるおそれの無い場所に保管すること。
- ・化学薬品のそばやガスの発生するような場所に保管しないこと。

2. 有効期間：5 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：クー・メディカル・ジャパン株式会社
製造業者：Amsino Medical (Kunshan) Co., Ltd (中国)