

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 酸素投与キット(12855000)

KM 酸素療法キット (エアゾールマスク)

再使用禁止

【警告】


- 医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが本品を使用すること。
- 本品を使用する前に、酸素供給回路に閉塞がないか、確認すること。
- 使用中は患者の状態を監視し、患者の体動や固定状態などに注意すること。
- 本品を使用する時は患者の状態に応じて生体情報モニタを併用すること。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 酸素供給以外の目的で使用しないこと。
- 本品を高温、裸火、又は発火源の近くで使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

＜外観＞

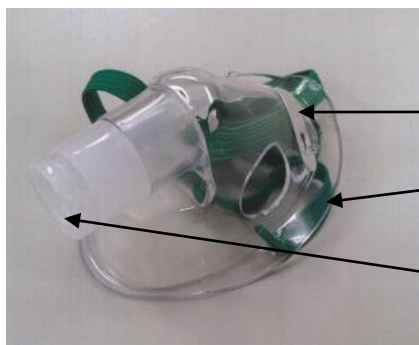

ノーズクリップ付
マスク

ストラップ

コネクタ

＜動作原理＞

マスクで患者の鼻及び口を覆い、コネクタに接続された蛇管を通して供給された酸素及び水蒸気を効率的に供給する。

＜原材料＞

マスク本体：ポリ塩化ビニル
(可塑剤：フタル酸ジイソノニル)

ストラップ：ポリウレタン

※本品は未滅菌品である。

【使用目的、効能又は効果】

酸素ガス等の投与に用いる。

【操作方法又は使用方法等】

- 蛇管(内径 22 mm)を本品コネクタに接続し、蛇管の他端をネプライザ等に接続してください。・流量を調節してください。
- マスクを顔にあて、ヘッドストラップを後頭部にかけて、鼻、口にぴったり密着するようにヘッドストラップの長さを調整してください。
- ノーズクリップを調整し、フィットさせてください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 使用前に各部を点検し、障害物や異物がないか、部品が紛失していないか確認すること。
- 使用前及び使用中は、どの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキックがないこと、異物が付着していないこと、適切な酸素流量が投与されていること、本品と酸素供給源との接続が確実であることを絶えず確認すること。
- 使用中は患者の状態を監視すること。
- 本マスクで長時間の酸素投与は行わないこと。
- 2時間ごとに患者の顔面ケア、8時間ごとにマスクの清拭を行うこと。
- ヘッドバンドをきつく締めすぎないこと。
- 患者の顔に取り付けたマスクに過剰に圧力を加えないこと。

＜その他の注意＞

- 院内感染防止の指針に従うこと。
- 使用後は関連法令を順守し廃棄すること。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- 高温多湿、直射日光を避け、できるだけ清潔な環境で室温保存してください。
- 気圧、通気性、ほこり、塩分、イオウ分含んだ空気など、悪影響を及ぼす影響のない場所に保管してください。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

＜有効期限・使用期限＞

- 本品の包装に記載されている「有効期限」までに使用してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：クー・メディカル・ジャパン株式会社

TEL03-5577-5901 FAX03-5577-5904

製造業者：Koo Medical Equipment (Shanghai)Co., Ltd.
中国上海