

機械器具 O6 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ(70569000)
人工鼻用酸素チューブ

再使用禁止**【警告】**

1. 本品を使用する前に、酸素供給回路に閉塞がないか、確認すること。
2. 使用中は患者の状態を監視し、患者の体動や固定状態などに注意すること。
3. 接続部の漏れや外れに注意し締め直し等適切な処置を施すこと。

【禁忌・禁止】

1. 酸素供給以外の目的で使用しないこと。
2. 本品を高温、裸火、又は発火源の近くで使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**＜外観・各部の名称＞**KM-2120
KM-2121

ユニバーサルコネクタ

L字型コネクタ

全長 2,1m

＜原理＞

本品は、酸素ガス供給源と呼吸回路等に接続することで、患者に酸素ガスを供給する。

＜原材料＞

ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジイソノニル）

- ・未滅菌

【使用目的又は効果】

呼吸回路等に酸素ガスを供給するために用いること。

【使用方法等】**＜使用方法＞**

- ① ユニバーサルコネクタを酸素ガス供給源に接続する。
- ② L字型コネクタを呼吸回路（気管切開患者用人工鼻等）に接続する。

【使用上の注意】**＜重要な基本的注意＞**

- ① 使用前に各部を点検し、外観上異常がないか、障害物や異物がないか確認し異常のあるものは使用しないこと。

- ② 取扱いに習熟したもの以外は使用しないこと。
- ③ 使用前及び使用中は、どの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないこと、適切な酸素流量が投与されていること、本品と酸素供給源との接続が確実であることを絶えず確認すること。
- ④ 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジイソノニルが溶出する恐れがあるので注意すること。

＜その他の注意＞

- ① 院内感染防止の指針に従うこと。
- ② 使用後は関連法令を順守し廃棄すること。

【保管方法および有効期間等】**＜保管方法＞**

- ・高温多湿、直射日光を避け、できるだけ清潔な環境で室温保存してください。
- ・気圧、通気性、ほこり、塩分、イオウ分含んだ空気など、悪影響を及ぼす影響のない場所に保管してください。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

＜有効期限・使用期限＞

- ・本品の包装に記載されている「有効期限」までに使用してください。

【包装】KM-2120 10本
KM-2121 1本**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**製造販売業者：クー・メディカル・ジャパン株式会社
TEL03-5577-5901 FAX03-5577-5904製造業者：Koo Medical Equipment (Shanghai)Co., Ltd.
中国上海